

instrukcja obsługi

HERO



Spis treści

1	INFORMACJE OGÓLNE	4
1.1	Przedmowa	4
1.2	Przeznaczenie i wskazania	4
1.3	Wskazówki	6
1.4	Deklaracja zgodności	6
1.5	Warunki gwarancji	6
1.6	Serwis i naprawy	7
1.7	Szkolenie użytkowników	7
1.8	Zatwierdzenie/kompatybilność w połączeniu z dostępnymi w handlu fotelikami samochodowymi dla dzieci	7
2	BEZPIECZEŃSTWO I MONTAŻ W POJEŹDZIE	8
2.1	Poznaj HERO-XL	8
2.	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	10
2.	Zastosowanie w pojeździe	11
2.	Dolne punkty mocowania	11
2.5	Mocowanie pasów napinających	13
2.6	Montaż w pojeździe	15
3	OBSŁUGA MODELU PODSTAWOWEGO	18
3.1	Zapinanie dziecka	18
3	Regulacja zagłówka	22
3.	Wyjmowanie z pojazdu	23
3.	Konserwacja i pielęgnacja	24
4	KORZYSTANIE Z OPCJONALNEGO WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO	25

Spis treści

4.1	Poduszki na klatkę piersiową	25
4.2	Klin odwodzący	25
4.3	Adapter głębokości siedziska	26
4.4	Poduszki podparcia i bezpieczeństwa	26
5	GWARANCJA	27
6	OZNAKOWANIE	28
7	DANE TECHNICZNE	29

1. Informacje ogólne

1 Informacje ogólne

1.1 Wstęp

Wybrali Państwo fotelik samochodowy „HERO-XL” i otrzymują Państwo wysokiej jakości produkt naszej firmy. Dziękujemy za zaufanie.

Aby produkt służył Państwu przez długi czas i ułatwiał codzienne życie, przekazujemy Państwu niniejszą instrukcję obsługi. Zawiera ona informacje dotyczące prawidłowej i łatwej obsługi oraz niezbędnej pielęgnacji i konserwacji. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową obsługą i zapewnić optymalne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji i wskazówek. W przypadku dodatkowych pytań lub problemów prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą. Życzymy bezproblemowego użytkowania i mamy nadzieję, że nasze produkty spełnią Państwa oczekiwania.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych w stosunku do wersji opisanej w niniejszej instrukcji obsługi.

Przed zamontowaniem urządzenia w samochodzie osobowym i pierwszym użyciu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi montażu na stronach 7–15 i przestrzeganie ich.

Prosimy upewnić się, że instrukcja obsługi pozostaje przy produkcie i jest dostępna dla każdego użytkownika.

HERNIK GmbH

1.2 Przeznaczenie i wskazania

Urządzenie HERO-XL zostało zaprojektowane do transportu dzieci o specjalnych potrzebach (GMFCS 3-5; np. wyraźne osłabienie mięśni z brakiem kontroli głowy i tułowia) w pojazdach silnikowych. Dzieciom z zaburzeniami kontroli głowy i tułowia (np. porażenie mózgowe, dystrofia mięśniowa, hipotonia, zaburzenia rozwoju motorycznego) można zapewnić odpowiednią pozycję dzięki regulacji kąta nachylenia siedziska i specjalnym wyściółkom zawartym w wyposażeniu podstawowym, co gwarantuje bezpieczny transport.

Dzięki ważnym akcesoriom opcjonalnym można indywidualnie dostosować fotel do specjalnych potrzeb, np. poprzez zamontowanie stabilnego klina odwodzącego, pelotek klatki piersiowej, adaptera głębokości siedziska lub poduszek podtrzymujących i zabezpieczających.

1. Informacje ogólne

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „4.3 ” (Dane techniczne i informacje dotyczące

1. Informacje ogólne

1.3 Wskazówki

Fotel samochodowy dla dzieci niepełnosprawnych HERO-XL składa się z:

1. standardowym fotelikiem samochodowym firmy Axkid (proszę przestrzegać instrukcji obsługi producenta).
2. moduł dostosowujący z akcesoriami, który umożliwia wyposażenie fotelika samochodowego zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka. W tym celu należy przestrzegać instrukcji obsługi firmy HERNIK GmbH.

1.4 Deklaracja zgodności

Firma HERNIK GmbH oświadcza na własną odpowiedzialność, że fotelik samochodowy „HERO-XL” spełnia podstawowe wymagania (załącznik 1 do dyrektywy 93/42 EWG). Produkt posiada oznaczenie CE zgodnie z powyższą dyrektywą.

1.5 Warunki gwarancji

Gwarancja może zostać udzielona tylko wtedy, gdy produkt jest używany zgodnie z podanymi warunkami i przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez części i części zamienne, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.

1. Informacje ogólne

1.6 Serwis i naprawy

Serwis i naprawy urządzenia HERO-XL mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczny serwis. W przypadku problemów należy skontaktować się z odpowiednim sprzedawcą. W przypadku napraw otrzymacie Państwo wyłącznie oryginalne części zamienne.

1.7 Szkolenie z użytkowania

Fotelik samochodowy jest dostarczany w stanie całkowicie zmontowanym. W momencie dostawy sprzedawca specjalistyczny instruuje użytkownika, korzystając z instrukcji obsługi, w zakresie użytkowania urządzenia. Sprzedawca specjalistyczny powinien wspólnie z użytkownikiem zamontować fotelik samochodowy w samochodzie. Aby uzyskać optymalną pozycję siedzącą, konieczne jest indywidualne dostosowanie fotelika samochodowego do warunków dziecka. Powinno to być zasadniczo wykonane przez sprzedawcę specjalistycznego.

1.8 Zatwierdzenie/kompatybilność w połączeniu z dostępnymi w handlu fotelikami samochodowymi dla dzieci

HERO-XL wraz ze wszystkimi akcesoriami jest homologowanym fotelikiem samochodowym dla dzieci zgodnie z normą ECE R129/03. Poszczególne części i akcesoria HERO-XL nie są dopuszczone do łączenia z innymi fotelikami samochodowymi dla dzieci dostępnymi w handlu. Zmiana może spowodować utratę homologacji HERO-XL, jak również fotelika samochodowego dla dzieci dostępnego w handlu.


2. Bezpieczeństwo fotelika HERO-XL i montaż w pojeździe

2 Bezpieczeństwo fotelika HERO-XL i montaż w pojeździe

2.1 Poznaj fotelik HERO-XL



2. Bezpieczeństwo fotelika HERO-XL i montaż w pojeździe

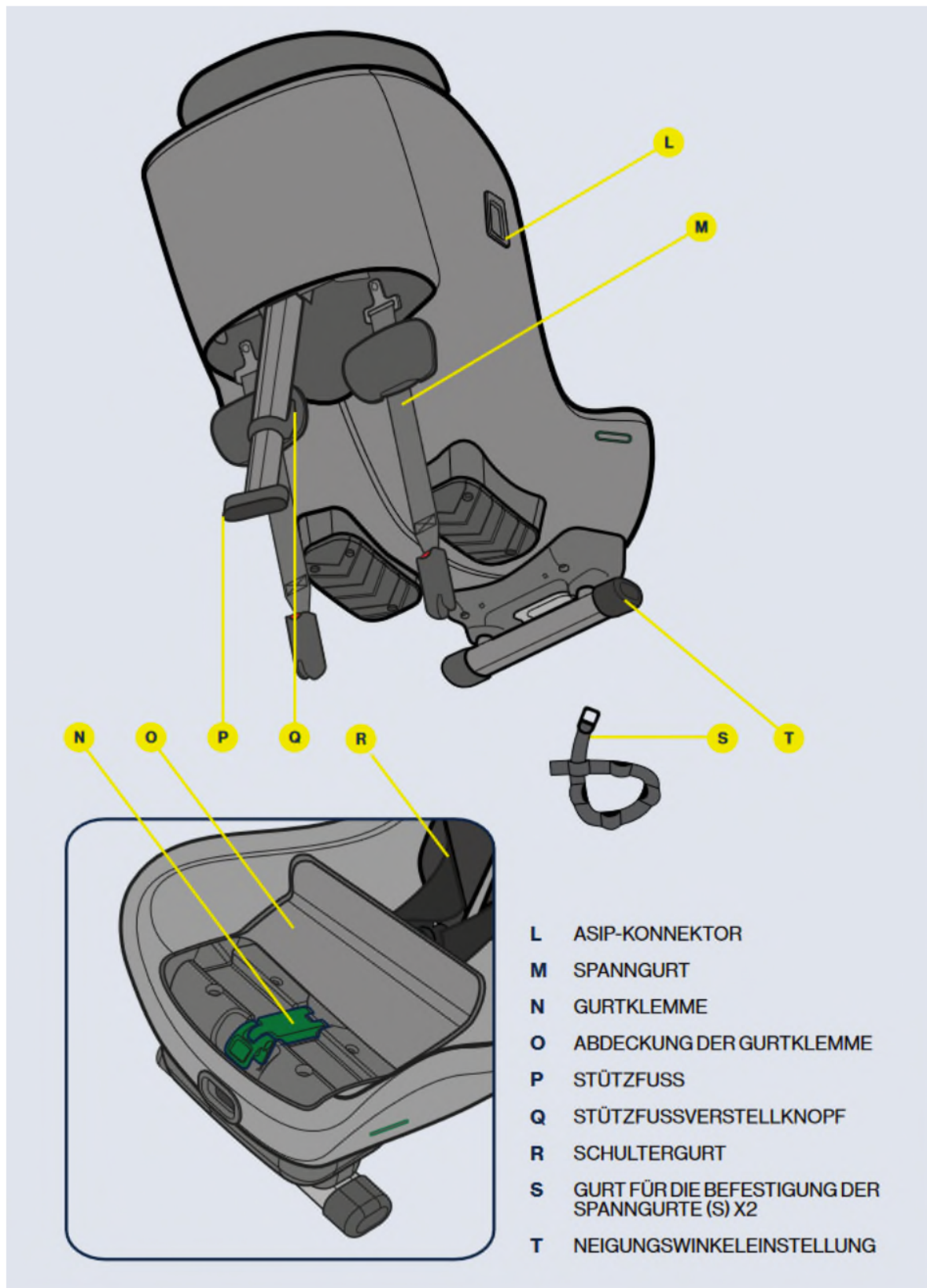

2. Bezpieczeństwo fotelika HERO-XL i montaż w pojeździe

2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Fotelik HERO-XL należy zawsze mocować w pojeździe zgodnie z instrukcją montażu, nawet jeśli nie jest używany. Niezamocowany fotelik może spowodować obrażenia innych pasażerów podczas gwałtownego hamowania.

- Fotelik HERO-XL należy zamocować w samochodzie w taki sposób, aby nie został zakleszczony przez przednie siedzenia lub drzwi pojazdu.
- Pasy nie mogą być skręcone ani zakleszczone i muszą być napięte.
- Po wypadku fotelik samochodowy nie może być ponownie używany.
- Zawsze zapinaj dziecku pasy bezpieczeństwa.
- Przed każdą jazdą sprawdź, czy zapięcie pasów jest prawidłowo zablokowane, a podnózek prawidłowo ustawiony.
- Upewnij się również, że wszystkie stałe elementy i części plastikowe fotelika HERO-XL są zamocowane w taki sposób, aby podczas codziennego użytkowania pojazdu nie mogły zostać przytrzaśnięte przez ruchomy fotel lub drzwi.
- Zaleca się odpowiednie zabezpieczenie bagażu i innych przedmiotów.
- Fotelika samochodowego nie wolno używać bez pokrowca.
- Należy pamiętać, że fotelik samochodowy może stać się zbyt gorący dla skóry dziecka, jeśli pozostawi się go na słońcu bez pokrowca tekstylnego przez dłuższy czas.
- Pokrowiec można wymienić wyłącznie na oryginalny pokrowiec firmy HERNIK.
- Nie pozostawiaj dziecka bez opieki w foteliku samochodowym.
- Nie należy wprowadzać żadnych zmian ani uzupełnień do urządzenia.
- Należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu dostarczonej przez firmę HERNIK.
- Instrukcja obsługi powinna zawsze znajdować się w pojeździe.

2. Bezpieczeństwo fotelika HERO-XL i montaż w pojeździe

2.3 Użytkowanie w pojeździe

Fotelik samochodowy dla dzieci HERO-XL może być montowany wyłącznie tyłem do kierunku jazdy. Pasuje do większości, ale nie wszystkich siedzeń. Informacje na temat siedzeń samochodowych dopuszczonych do stosowania z urządzeniami przytrzymującymi dla dzieci zgodnie z normą ECE R16 można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

Możliwości zastosowania HERO-XL (i-SIZE):

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Rücksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	JA
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt	NEIN
Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN



WAŻNE! Jeśli chcesz zamontować fotelik dziecięcy HERO-XL na siedzeniu z przednią poduszką powietrzną, poduszka powietrzna musi zostać wyłączona zgodnie z instrukcją producenta pojazdu. Należy pamiętać, że w niektórych pojazdach wyłączenie poduszki powietrznej może być wykonane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

2.4 Dolne punkty mocowania

Pasy napinające do przodu służą do poprawy bezpieczeństwa dzieci w samochodach, umożliwiając stabilny i pewny montaż fotelików dziecięcych z pasami bezpieczeństwa, montowanych tyłem do kierunku jazdy. Mocowanie to zwiększa bezpieczeństwo dziecka podczas wszelkiego rodzaju kolizji, w tym dachowania i najechania od tyłu.


Pasy napinające zapewniają dokładny dopasowanie i łatwy montaż w pojazdach z fabrycznie zainstalowanymi dolnymi punktami mocowania. Fabrycznie zainstalowane dolne punkty mocowania w pojazdach znajdują się często na szynach siedzeń przymocowanych do podłogi, ale możliwe są również inne pozycje. Więcej informacji na temat punktów mocowania można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu. Jeśli pojazd nie posiada dolnych punktów mocowania, można użyć dodatkowych pasów do dolnego mocowania (S), które są dołączone do zestawu HERO-XL. Instrukcja montażu znajduje się w niniejszej instrukcji obsługi.

WAŻNE! Nigdy nie używaj fotelika HERO-XL bez pasów napinających z przodu. Są one ważnym elementem bezpieczeństwa i muszą być zawsze używane podczas montażu fotelika dziecięcego.

2. Bezpieczeństwo fotelika HERO-XL i montaż w pojeździe


2. Bezpieczeństwo fotelika HERO-XL i montaż w pojeździe

2.5 Mocowanie pasów napinających

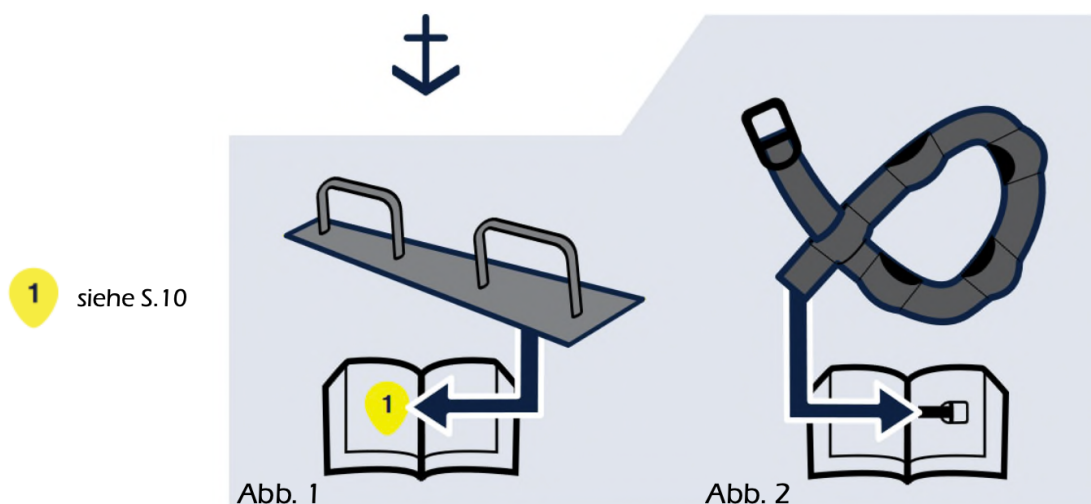

Jeśli pojazd nie posiada odpowiednich fabrycznie zamontowanych dolnych punktów mocowania (rys. 1), można użyć pasów do dolnego mocowania, które są dołączone do zestawu HERO-XL (rys. 2). W zależności od pojazdu i pozycji, w której chcesz zamontować fotelik dziecięcy, istnieją różne możliwe punkty mocowania pasów (patrz następna strona):

Aby zamontować pasy do dolnego mocowania (S), wystarczy owinąć pas wokół wybranego punktu mocowania i przełożyć metalowe mocowanie przez jeden z otworów w pasie (rys. 3). Pas mocujący posiada kilka otworów, które można wykorzystać. Należy pamiętać, aby użyć szczeliny znajdującej się najbliżej metalowego mocowania, aby zamontować metalowe mocowanie jak najbliżej podłogi pojazdu. Następnie pociągnij za metalowy element mocujący, aby napiąć pas, i powtórz tę czynność dla drugiego pasa. Podczas montażu HERO-XL zawsze używaj dwóch punktów mocowania, które powinny być od siebie oddalone, ponieważ zapewnia to stabilniejszy montaż.

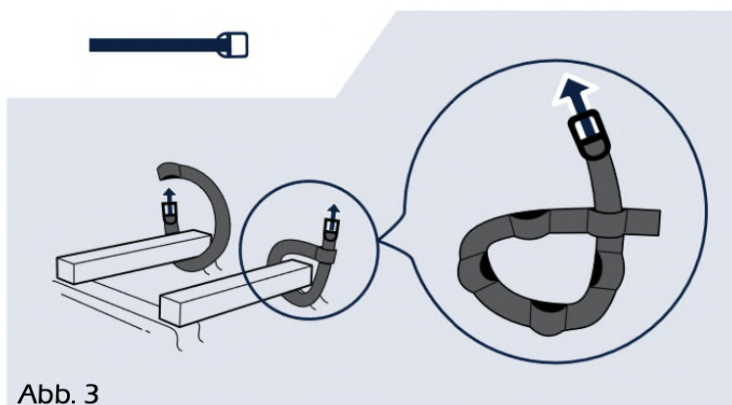

Opcje prowadzenia paska mocującego:

2. Bezpieczeństwo fotelika HERO-XL i montaż w pojeździe


alt. a) Przełóż pas wokół krawędzi wstępnie zainstalowanego punktu mocowania (użyj tej metody tylko wtedy, gdy wstępnie zainstalowane punkty mocowania nie pasują bezpośrednio do dolnych pasów mocujących).

alt. b) Przełóż pas wokół szyny siedzenia przed fotelikiem dziecięcym, przepuszczając pas między szyną siedzenia a podłogą pojazdu lub przez odpowiedni otwór w szynie siedzenia.

alt. c) Przełóż pas wokół przegubu siedzenia przed fotelikiem dziecięcym, przepuszczając pas między oparciem siedzenia pojazdu a wyściółką siedzenia.

alt. d) Przełóż pas wokół szyny siedziska pod fotelikiem dziecięcym, przepuszczając pas między szyną siedziska a podłogą pojazdu lub przez odpowiedni otwór w szynie siedziska.

alt. e) Jeśli fotelik HERO-XL jest zamontowany na fotelu pasażera i żadna z powyższych opcji nie jest możliwa, pasy dolnego mocowania można przymocować do odpowiedniego punktu mocowania z tyłu pojazdu i poprowadzić pasy pod siedzeniem pojazdu do przedniej części pojazdu. Należy upewnić się, że pasy mocujące nie wystają z przodu siedzenia, a nie z boków.

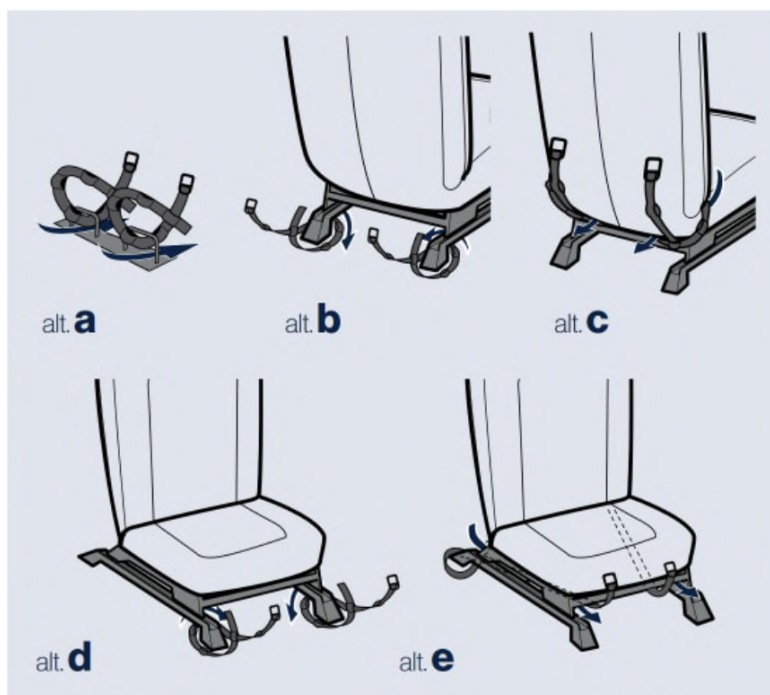


2. Bezpieczeństwo fotelika HERO-XL i montaż w pojeździe

2.6 Montaż w pojeździe

1) Otwórz zamek błyskawiczny i otwórz pokrywę zacisku pasów (O).

2) Umieść HERO-XL na siedzeniu pojazdu, tyłem fotelika dziecięcego skierowanym do przodu pojazdu. Dostosuj przestrzeń na nogi dziecka, przesuwając fotelik dziecięcy do przodu i do tyłu na siedzeniu pojazdu. Fotelik HERO-XL można zamontować blisko oparcia siedzenia samochodu, ale nigdy nie wolno go montować w taki sposób, aby podnózek (J) wystawał poza krawędź siedzenia samochodu. Należy upewnić się, że pionowa linia (K) na podnóżku (J) nigdy nie przecina krawędzi siedzenia samochodu.

Ustaw kąt nachylenia fotelika dziecięcego, naciskając dźwignię regulacji kąta nachylenia (G) i wybierając odpowiednią pozycję. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, wybierz pozycję jak najbardziej pionową, jednocześnie upewniając się, że głowa dziecka nie opada do przodu podczas snu. Ze względów komfortu i bezpieczeństwa kąt nachylenia należy ustawić w pozycji bardziej pionowej w miarę wzrostu dziecka. Należy pamiętać, że podczas napinania pasów napinających (M) fotelik dziecięcy odchyła się nieco bardziej do tyłu, ponieważ zapada się w tapicerkę siedzenia samochodu. Podczas montażu fotelika HERO-XL na siedzeniu pasażera tył fotelika dziecięcego może stykać się z deską rozdzielczą, ale nie jest to konieczne.

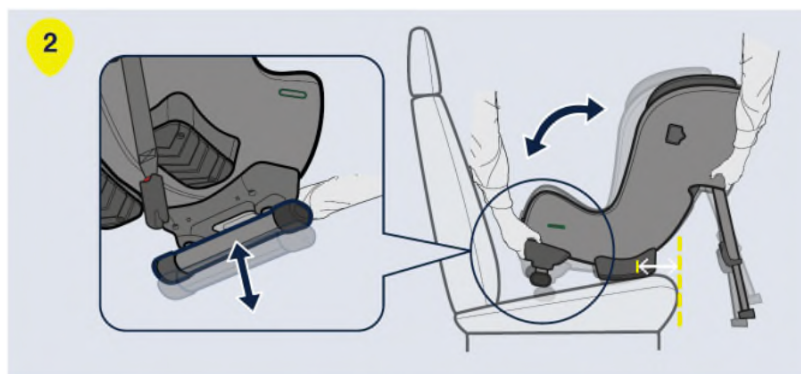


3) Otwórz zacisk pasów (N). Wyciągnij pas bezpieczeństwa na długość ramienia i przetóż go przez najbliższą szczelinę pasa bezpieczeństwa (D). Przetóż pas przez zacisk pasów (N), a następnie przez szczelinę pasa bezpieczeństwa (D) po przeciwnej stronie. Zapiąć pas bezpieczeństwa pojazdu za pomocą klamry i mocno pociągnąć za część barkową pasa bezpieczeństwa pojazdu, aby był napięty, a fotelik dziecięcy był bezpiecznie zamocowany. Im mocniej pociągniesz, tym mocniejsza będzie instalacja. Gdy fotelik dziecięcy jest mocno zapięty, zamknąć zacisk pasa (N) i zablokować pas bezpieczeństwa pojazdu w jego pozycji. Upewnij się, że zarówno pas barkowy, jak i biodrowy są zablokowane razem w zacisku pasa (N). Zamknij pokrywę zacisku pasa (O) i zamknij zamek błyskawiczny. Aby uzyskać jeszcze


2. Bezpieczeństwo fotelika HERO-XL i montaż w pojeździe

mocniejsze i stabilniejsze mocowanie, naciśnij fotelik dziecięcy w dół, jednocześnie pociągając za część barkową pasa bezpieczeństwa.

2. Bezpieczeństwo fotelika HERO-XL i montaż w pojeździe

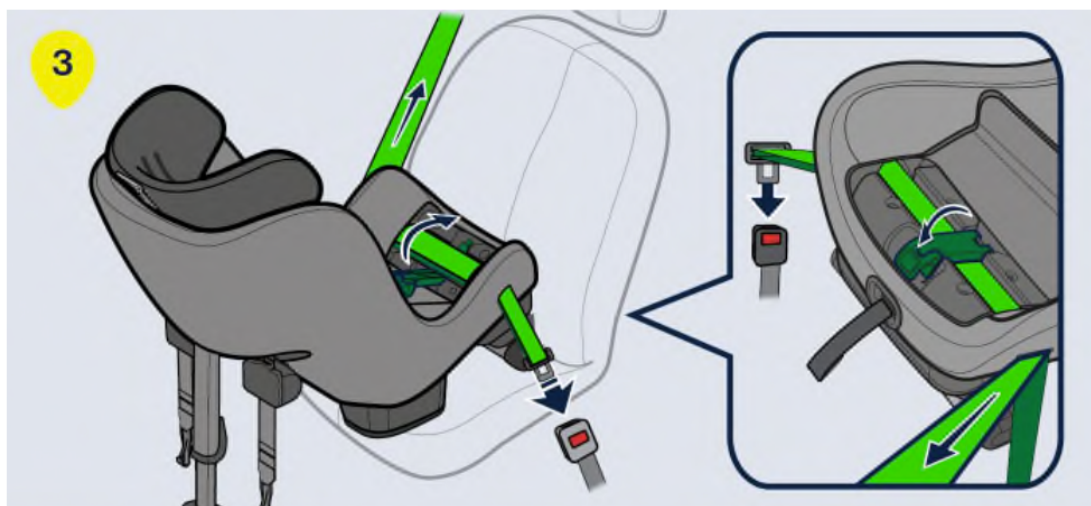


4) Wyciągnij pasy napinające (M) z fotelika dziecięcego i podłącz je do dolnych punktów mocowania w pojeździe. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Dolne punkty mocowania” na stronie 10 niniejszej instrukcji. Nacisnąć górną część fotelika dziecięcego i potrząsnąć nim na boki. Samonapinające pasy (M) fotelika HERO-XL zostaną automatycznie napięte. Napinając pasy (M), ustawia się również ostateczny kąt nachylenia fotelika dziecięcego. Naciskaj fotelik dziecięcy, aż zostanie bezpiecznie zamocowany i osiągniesz odpowiedni kąt nachylenia. Sprawdź, czy widoczne jest białe oznaczenie na dolnym pasie mocującym. Jeśli nie, dolne punkty mocowania znajdują się zbyt blisko fotelika dziecięcego i należy je wyregulować. Jeśli nie jest to możliwe, można również skrzyżować pasy napinające za fotelikiem, aby uzyskać nieco więcej miejsca.

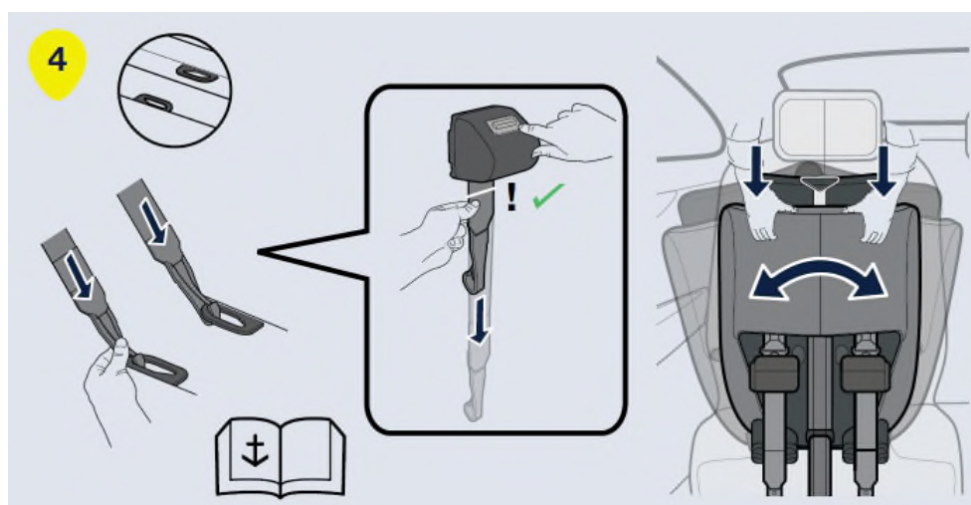

3. Obsługa modelu podstawowego

5) Wyciągnij podpórkę (P) z fotelika dziecięcego. Naciśnij przycisk podpórki (Q) i pociągnij podpórkę (P) w dół, aż dotknie podłogi pojazdu. Zwolnij przycisk podpórki (Q) i podnieś fotelik dziecięcy, aby wysunąć podpórkę (P) do momentu usłyszenia kliknięcia. Nóżka podporowa (P) powinna być teraz zablokowana i mocno dociśnięta do podłogi pojazdu. Upewnić się, że nóżka podporowa (P) jest nachylona pod kątem około 10° w stosunku do przodu pojazdu. Ponownie sprawdź, czy pas bezpieczeństwa pojazdu jest nadal mocno napięty i czy pas biodrowy nie poluzował się podczas napinania dolnych pasów mocujących i podpórki. Jeśli pas bezpieczeństwa pojazdu nieco się poluzował, po prostu napnij go ponownie, powtarzając krok 2 niniejszej instrukcji bez odpinania pasów napinających.

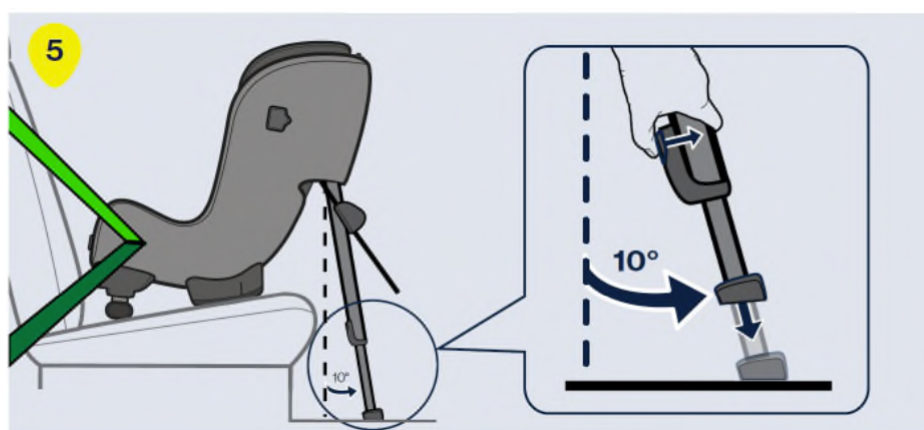

6) Wsuń ASIP (I) w szczeliny złącza ASIP (L) i przesun w dół, aż ASIP (I) zaskoczy. Jeśli na złączu ASIP (L) znajduje się plastikowa osłona, należy ją zdjąć i umieścić na złączu ASIP (L) po przeciwnej stronie fotelika przed zamocowaniem ASIP (I). Upewnić się, że ASIP (I) jest zamocowany po stronie fotelika dziecięcego HERO-XL najbliższej drzwiom pojazdu.



3 Obsługa modelu podstawowego

3.1 Zapinanie dziecka

3. Obsługa modelu podstawowego


Przed zapięciem dziecka w foteliku HERO-XL upewnij się, że w foteliku znajduje się odpowiednia wkładka. Fotelik HERO-XL został zaprojektowany tak, aby rosnać wraz z dzieckiem i zapewnić mu wygodne i bezpieczne siedzenie. Zaleca się stosowanie wkładki do momentu, aż stanie się ona zbyt ciasna dla dziecka.

Fotelik HERO-XL jest wyposażony w automatyczny zagłówek (A), który automatycznie opuszcza się do właściwej pozycji po zapięciu zintegrowanego pasa bezpieczeństwa. Aby zapewnić optymalną pozycję, firma HERNIK zaleca korzystanie z tej funkcji za każdym razem, gdy zapinasz dziecko. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku upewnij się, że automatyczny zagłówek (A) znajduje się w pozycji odblokowanej.

7) Upewnij się, że dźwignia hamulca zagłówka (H) znajduje się w pozycji odblokowanej. Jeśli dźwignia znajduje się w pozycji zablokowanej, naciśnij ją, aby ją odblokować.




8) Rozpiąć zintegrowany pas bezpieczeństwa, naciskając przycisk zwalniający pas (E) i wyciągając jednocześnie oba pasy barkowe (R). Należy unikać ciągnięcia tylko za jeden pas, ponieważ może to spowodować nierównomierne rozłożenie pasów barkowych (R). Upewnij się, że zagłówek (A) znajduje się w najwyższym położeniu:

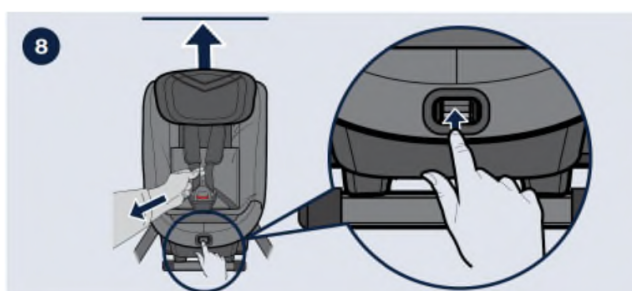


3. Obsługa modelu podstawowego

9) Odblokuj zamek pasów, naciskając przycisk zwalniający zamek (C) i umieść pasy poza fotelikiem.

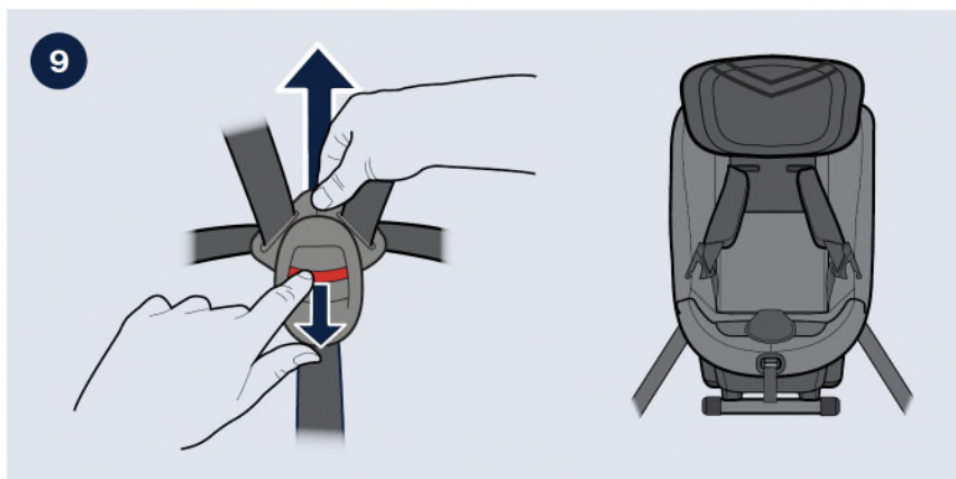


10) Usiądź dziecko w foteliku i połóż pasy barkowe (R) na ramionach dziecka. Zablokuj zintegrowany pas bezpieczeństwa, najpierw łącząc części zamka przymocowane do pasów barkowych (R), a następnie wsuwając je do zamka, aż usłyszysz kliknięcie.

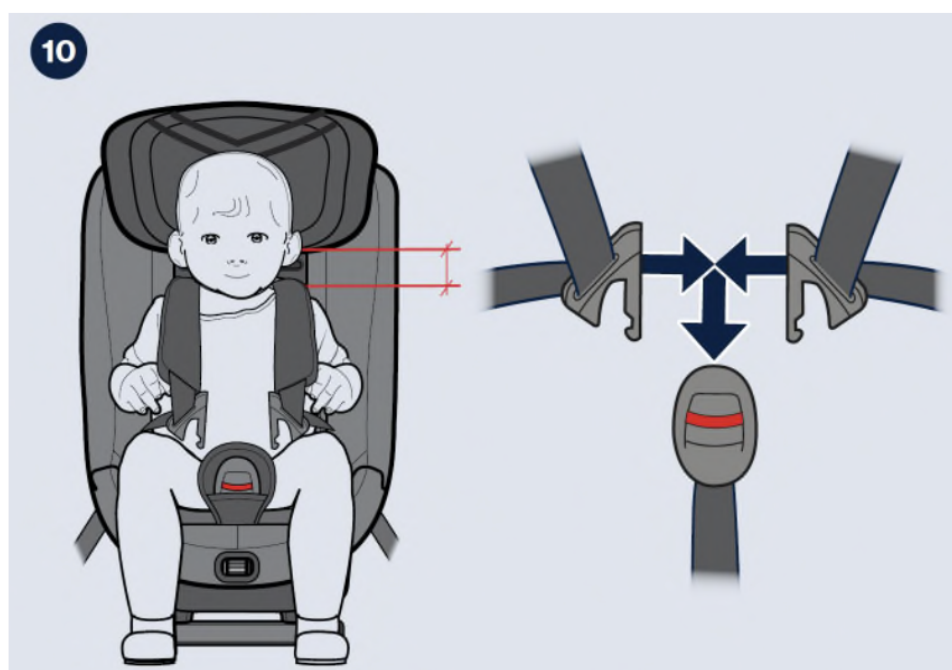

3. Obsługa modelu podstawowego

11) Pociągnij pasy barkowe (R), aby napiąć zintegrowany pas bezpieczeństwa nad biodrami dziecka. Trzymając pasy barkowe (R) napięte, pociągnij napinacz pasa (F) prosto od fotelika dziecięcego, aż pas będzie wystarczająco napięty. Pomiędzy pasami barkowymi (R) a ramionami dziecka nie powinno mieścić się więcej niż jeden palec. Podczas napinania pasa zagłówek (A) automatycznie przesuwa się w dół do pozycji odpowiedniej dla dziecka.

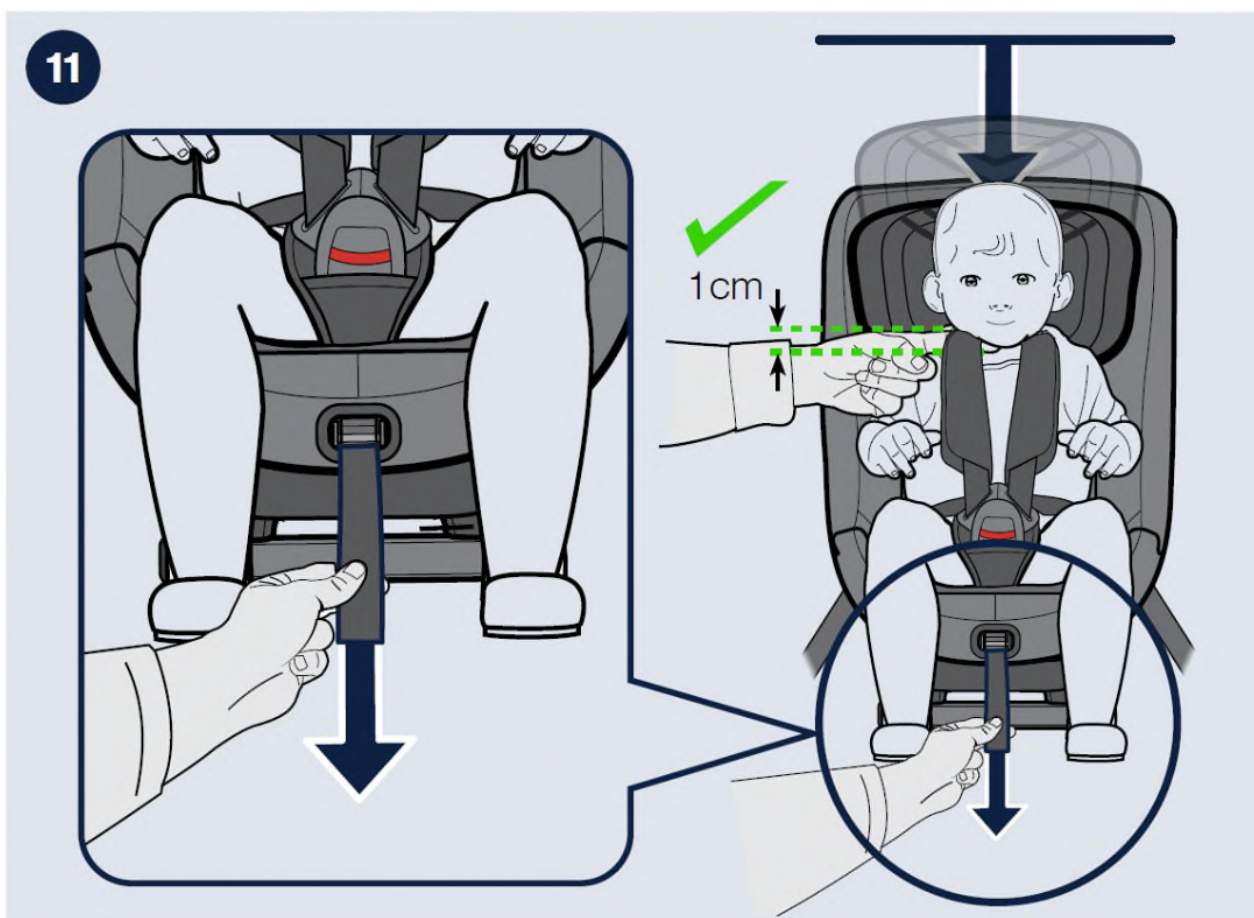

3. Obsługa modelu podstawowego

3.2 Regulacja zagłówka

Fotelik HERO-XL jest wyposażony w automatyczny zagłówek (A), który zapewnia, że zagłówek (A) zawsze znajduje się w pozycji optymalnej dla dziecka. Po napięciu zintegrowanego pasa bezpieczeństwa zagłówek (A) opuszcza się do odpowiedniej wysokości i automatycznie zatrzymuje. Po zwolnieniu pasa zagłówek (A) wraca do najwyższej pozycji i zostaje odblokowany. Aby zapewnić optymalną pozycję, zaleca się korzystanie z tej funkcji za każdym razem, gdy zapinasz dziecko.

Zagłówek (A) odblokowuje się tylko w najwyższym położeniu. Należy zatem upewnić się, że podczas odpinania zintegrowanego pasa bezpieczeństwa zagłówek (A) powrócił całkowicie do najwyższego położenia, ponieważ w przeciwnym razie zagłówek (A) pozostanie zablokowany i nie opuści się podczas napinania pasa. Jeśli chcesz wyłączyć automatyczną regulację i utrzymać zagłówek (A) w stałej pozycji, ustaw zagłówek (A) w żądanej pozycji i przesunąć dźwignię hamulca zagłówka (H) do pozycji zablokowanej. Zagłówek (A) jest teraz zablokowany na odpowiedniej wysokości i nie porusza się, dopóki dźwignia hamulca zagłówka (H) nie zostanie ponownie ustawiona w pozycji odblokowanej.

Jeśli używasz fotelika HERO XL z zamontowanym zagłówkiem (A), upewnij się, że zagłówek (A) znajduje się w pozycji odpowiedniej dla dziecka. Upewnij się, że pasy barkowe (R) przebiegają bezpośrednio przez ramiona dziecka lub maksymalnie 1 cm powyżej nich. Jeśli tak nie jest, wyreguluj zagłówek (A), ustawiając dźwignię hamulca zagłówka (H) w pozycji odblokowanej i przesuwając zagłówek (A) do górnej pozycji, aby go odblokować, a następnie powtórz tę czynność.

UWAGA! Po wysunięciu zagłówka można rozłożyć oparcie pleców (rys. 1). Po ponownym obniżeniu zagłówka należy odpowiednio złożyć oparcie pleców (rys. 2).



Abb. 1

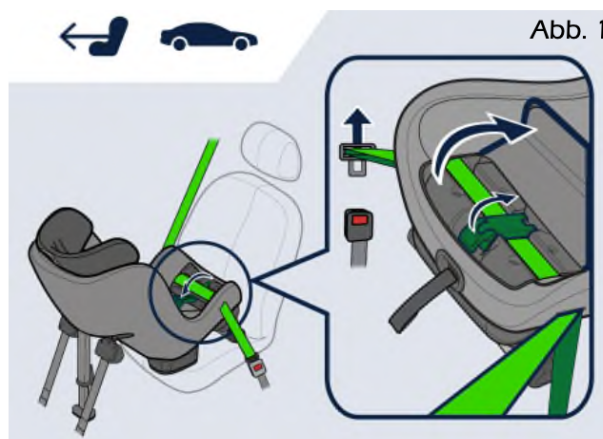


Abb. 2


3. Obsługa modelu podstawowego

3.3 Demontaż z pojazdu


1) Rozsuń zamek błyskawiczny i otwórz osłonę zacisku pasa (O). Odblokuj pas bezpieczeństwa pojazdu, naciskając czerwony przycisk zamka pasa bezpieczeństwa. Otwórz zacisk pasa (N) i wyciągnij pas bezpieczeństwa pojazdu przez szczeliny pasa (D), aby wyjąć go z fotelika dziecięcego (rys. 1).



2) Odblokuj dolne pasy mocujące (M), trzymając mocno łącznik i naciskając kciukiem czerwony przycisk. Trzymaj łącznik w dłoni i powoli wsuń go z powrotem do fotelika dziecięcego. Uważaj, aby nie puścić łącznika dolnego pasa mocującego, ponieważ cofa się on automatycznie z dużą prędkością (rys. 2).

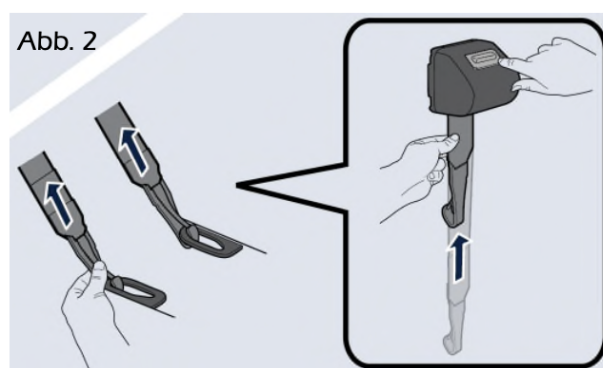

3) Naciśnij przycisk podpórki (Q) i ustaw podpórkę (P) w najkrótszym położeniu (rys. 3).

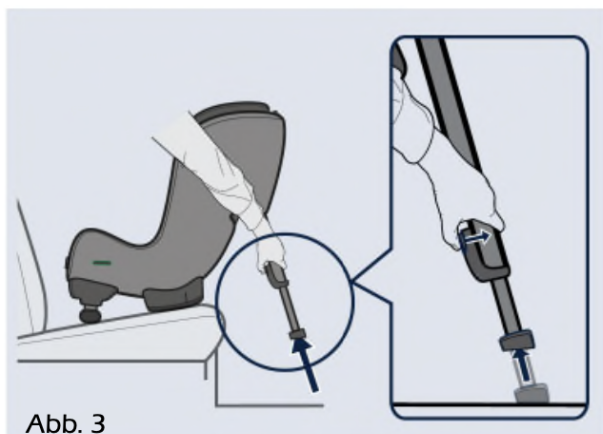

3. Obsługa modelu podstawowego

4) Naciśnij dźwignię regulacji kąta nachylenia siedziska (G) i przesun regulator kąta nachylenia siedziska (T) do najkrótszej pozycji. Wyjmij fotelik HERO-XL z pojazdu.

WSKAZÓWKI! Przed wyjęciem fotelika z pojazdu należy zablokować zamek pasów i napiąć pasy. Pas barkowy (R) można następnie wykorzystać jako uchwyt do przenoszenia, aby łatwiej wyjąć fotelik z pojazdu i przenieść go na zewnątrz.

WAŻNE! Nigdy nie przenoś fotelika dziecięcego za zagłówek (A).

3.4 Pielęgnacja i konserwacja

Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji i konserwacji

Aby zapewnić pełną skuteczność ochrony fotelika dziecięcego:

- W razie wypadku przy prędkości zderzenia powyżej 10 km/h fotelik dziecięcy może ulec uszkodzeniu, które nie będzie od razu widoczne. W takim przypadku fotelik dziecięcy należy wymienić. Należy go zutylizować w odpowiedni sposób.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie ważne części pod kątem uszkodzeń. Należy upewnić się, że wszystkie elementy mechaniczne działają prawidłowo.
- Aby uniknąć uszkodzeń, należy uważać, aby fotelik dziecięcy nie został zakleszczony między twardymi przedmiotami (drzwiami samochodu, szynami siedzeń itp.).
- Fotelik dziecięcy należy zawsze sprawdzić, jeśli został uszkodzony (np. upadł na podłogę).
- Nigdy nie smaruj ani nie olejuj żadnych części fotelika dziecięcego.
- Aby fotelik mógł prawidłowo chronić dziecko, konieczne jest zamontowanie i użytkowanie fotelika HERO-XL dokładnie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

4. Korzystanie z opcjonalnego wyposażenia

4 Korzystanie z opcjonalnego wyposażenia

4.1 Poduszki klatki piersiowej

Poduszki klatki piersiowej pomagają dziecku ustabilizować górną część ciała, gdy kontrola tułowia jest ograniczona. Poduszki mocuje się za pomocą zapięcia na rzepy do płyty montażowej. Można je łatwo odpiąć. Po znalezieniu optymalnej pozycji poduszki należy ponownie zamocować, dociskając je do pleców i lekko obracając. Pokrowiec na podkładki klatki piersiowej można zdjąć i wyprać.



4.2 Klin odwodzący

Klin odwodzący pomaga dziecku utrzymać nogi w kontrolowanej pozycji. Jest on zamocowany do stabilnej ramy montażowej i można go regulować w głębokości i wysokości za pomocą dźwigni szybkiego napinania. Pokrowiec klina odwodzącego można zdjąć i wyprać.



4. Korzystanie z opcjonalnego wyposażenia

4.3 Adapter głębokości siedziska

Dzięki adapterowi głębokości siedziska (1) można zwiększyć głębokość siedziska o około 10 cm. Dzięki temu HERO-XL może być używany również przez większe dzieci.

Adapter głębokości siedziska jest zamocowany na stabilnej ramie montażowej i można go regulować w głębokości za pomocą dźwigni szybkiego zacisku (2).

Pokrowiec można zdjąć i prać.



4.4 Poduszki podtrzymujące i zabezpieczające

Poduszka podtrzymująca i zabezpieczająca (1) umożliwia dziecku oparcie rąk i stabilizację tułowia.

Można je przymocować za pomocą dwóch pasków z rzepami z tyłu siedziska.

Pokrowiec można zdjąć i wyprać.



5.Gwarancja

5 Gwarancja

Produkty HERNIK są zgodne z najnowszym stanem techniki i są produkowane zgodnie z surowymi normami jakości. W przypadku wyjątkowych reklamacji firma GmbH gwarantuje zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi HERNIK po dostawie

- 24 miesiące na wszystkie elementy stałe
- 12 miesięcy na wszystkie części ruchome

Nie udzielamy gwarancji na produkty wykonane na specjalne zamówienie, o ile nie wynika to z wad produkcyjnych lub materiałowych. W takim przypadku zapewniamy wymianę reklamowanego produktu w ciągu 12 miesięcy.

Roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji wymagają, aby urządzenie było użytkowane w sposób prawidłowy, zgodnie z instrukcją obsługi.

W przypadku zmian konstrukcyjnych, przeróbek lub nieprawidłowych napraw bez uprzedniej konsultacji z GmbH, roszczenia gwarancyjne HERNIK tracą ważność.

Dalsze roszczenia, niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności roszczenia o naprawienie szkody bezpośredniej lub pośredniej, są wykluczone.

6.Oznakowanie

6 Oznakowanie

Na odwrocie znajduje się następujące oznaczenie:



**Restraint device for special
requirements "S" (EN)**

Please read the user manual
before use!

7.Dane techniczne

7 Dane techniczne

	HERO-XL
SITZBREITE (Becken)	24 cm
SITZBREITE (Knie)	27 cm
SITZTIEFE	25 - 34 cm
RÜCKENHÖHE	28 - 45 cm
SCHEITELHÖHE	48 - 68 cm
Höhe Thoraxpelotten	13 - 20 cm
Gesamthöhe	65 - 82 cm
Gesamtbreite	43 cm
Gesamttiefe	55 cm
getestete Belastbarkeit	36 kg

Notatki

Notatki



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**