

bruksanvisning

HERO



Innehållsförteckning

1	ALLMÄN INFORMATION	4
1.1	Förord	4
1.2	Avsikt och indikation	4
1.3	Anmärkningar	5
1.4	Försäkran om överensstämmelse	5
1.5	Garantivillkor	5
1.6	Service och reparationer	6
1.7	Användarutbildning	6
1.8	Godkännande/kompatibilitet med avseende på kombination med vanliga bilbarnstolar	6
2	SÄKERHET OCH MONTERING I FORDON	7
2.1	Lär känna HERO-XL	7
2	Säkerhetsanvisningar	9
2.3	Användning i fordonet	10
2.	Nedre fästpunkter	10
2.5	Fästning av spännbanden	11
2.6	Montering i fordonet	13
3	HANTERING AV BASMODELLEN	15
3.1	Spänna fast barnet	15
3	Justering av huvudstödet	19
3.	Demontering från fordonet	20
3.	Skötsel och underhåll	21
4	ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR (TILLVAL)	22

Innehållsförteckning

4.1	Bröstkorgskuddar	22
4.2	Abduktionskil	22
4.3	Sittdjupsadapter	23
4.4	Stöd- och säkerhetsdyna	23
5	GARANTI	24
6	MÄRKNING	25
7	TEKNISKA DATA	26

1.Allmän information

1 Allmän information

1.1 Förord

Du har valt bilbarnstolen "HERO-XL" och får härmed en högkvalitativ produkt från vårt företag. Vi vill tacka dig för ditt förtroende.

För att du ska ha glädje av denna produkt under lång tid och att den ska underlätta din vardag, överlämnar vi denna bruksanvisning till dig. Den visar hur du använder produkten på ett korrekt och enkelt sätt samt hur du sköter och underhåller den. För att undvika skador på grund av felaktig användning och för att möjliggöra optimal användning, läs noga igenom följande anvisningar och information. Om du har ytterligare frågor eller problem, vänligen kontakta din återförsäljare. Vi önskar dig en problemfri användning och hoppas att våra produkter uppfyller dina förväntningar.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar av den utförande som beskrivs i denna bruksanvisning.

Innan du monterar produkten i din bil och använder den för första gången ber vi dig att läsa och följa monteringsanvisningarna på sidorna 7–15.

Se till att bruksanvisningen förblir på produkten så att den är tillgänglig för alla användare.

HERNIK GmbH

1.2 Avsedd användning och indikation

HERO-XL har utvecklats för transport av barn med särskilda behov (GMFCS 3-5, t.ex. uttalad muskulär hypotoni med bristande huvud- och bålkontroll) i motorfordon. Barn med dålig huvud- och bålkontroll (t.ex. cerebral pares, muskeldystrofi, hypotoni, motorisk utvecklingsstörning) kan få stöd i sin hållning tack vare den sittvinkel som ingår i standardutrustningen och specialkuddar, vilket garanterar en säker transport.

Viktiga tillbehör kan användas för att ta hänsyn till särskilda behov, t.ex. installation av en stabil abduktionskil, thoraxpelett, sittdjupsadapter eller stöd- och säkerhetskudde.

Mer information finns i kapitlet 4.3.

1. Allmän information

1.3 Anvisningar

HERO-XL handikappbarnstol består av:

1. en vanlig bilbarnstol från Axxid (se tillverkarens bruksanvisning).
2. en anpassningsmodul med tillbehör som gör det möjligt att utrusta bilbarnstolen efter ditt barns individuella behov. Följ bruksanvisningen från HERNIK GmbH.

1.4 Försäkran om överensstämmelse

HERNIK GmbH förklarar på eget ansvar att bilbarnstolen "HERO-XL" uppfyller de grundläggande kraven (bilaga 1 till direktiv 93/42 EWG). Produkten är märkt med CE-märket enligt ovan nämnda direktiv.

1.5 Garantibevis

Garanti kan endast ges om produkten används under de angivna förhållanden och för det avsedda ändamålet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av komponenter och reservdelar som inte har godkänts av tillverkaren.

1. Allmän information

1.6 Service och reparationer

Service och reparationer på HERO-XL får endast utföras av fackhandeln. Vid problem, vänd dig till din fackhandlare. Vid reparationer får du endast originalreservdelar där.

1.7 Användarutbildning

Bilbarnstolen levereras komplett monterad. Vid leveransen visar fackhandlaren användaren hur hjälpmedlet ska användas med hjälp av bruksanvisningen. Fackhandlaren bör tillsammans med användaren montera bilbarnstolen i bilen. För att uppnå en optimal sittposition är det nödvändigt att justera bilbarnstolen individuellt efter barnets förutsättningar. Detta bör alltid göras av fackhandlaren.

1.8 Godkännande/kompatibilitet med avseende på kombination med vanliga bilbarnstolar

HERO-XL är inklusive alla tillbehör en godkänd bilbarnstol enligt ECE R129/03. Enskilda delar och tillbehör till HERO-XL är inte godkända för kombination med andra vanliga bilbarnstolar. En ändring kan medföra att godkännandet för HERO-XL och den vanliga bilbarnstolen upphör att gälla.


2.Säkerhet & montering i fordon

2 Säkerhet & montering i fordon

2.1 Lär känna HERO-XL



2.Säkerhet & montering i fordon

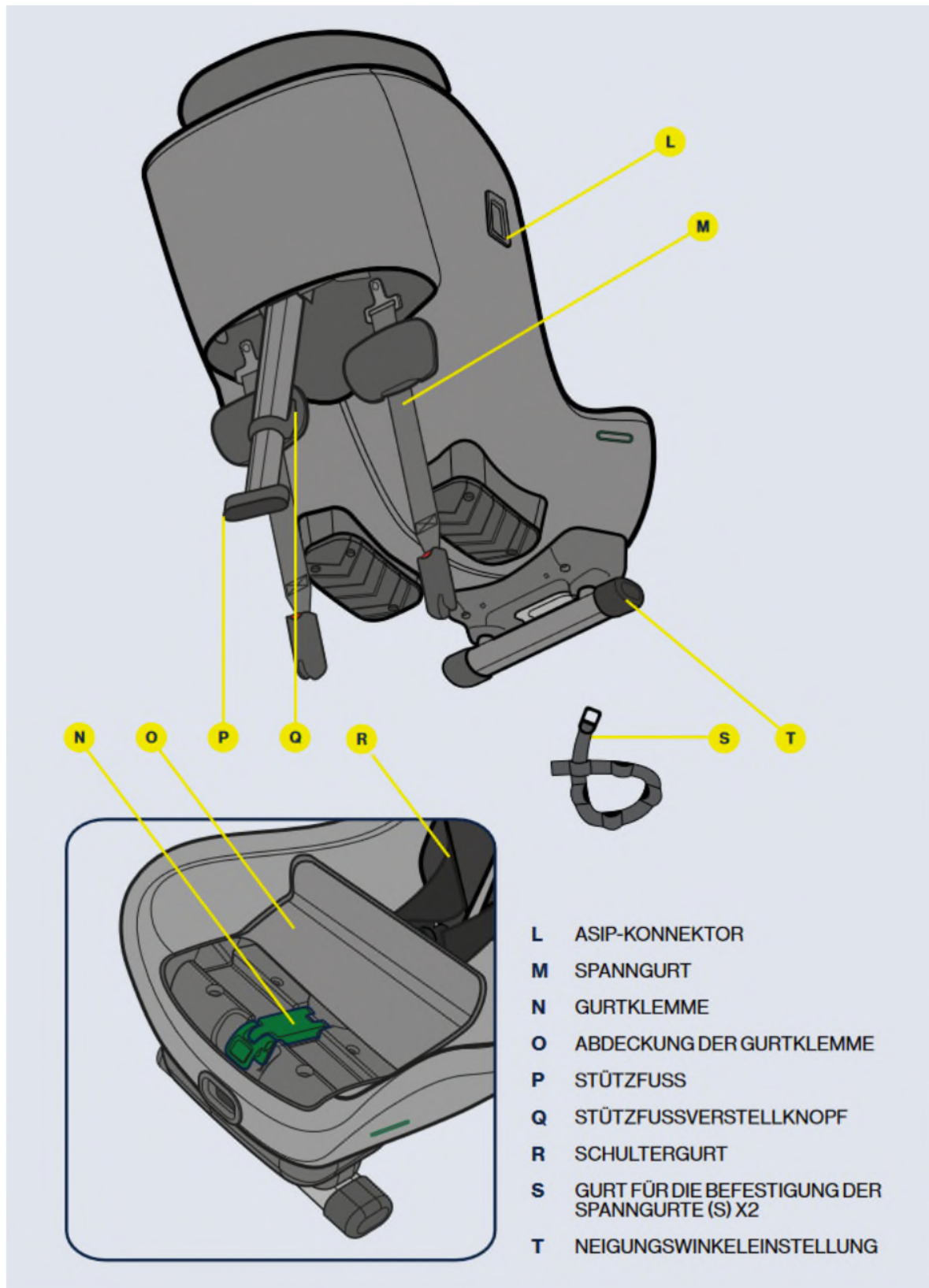

2.Säkerhet & montering i fordon

2.2 Säkerhetsanvisningar

HERO-XL ska alltid fästas i fordonet enligt monteringsanvisningarna, även när den inte används. En ofästad bilbarnstol kan skada andra passagerare vid en nödbromsning.

- HERO-XL ska fästas i bilen så att den inte fastnar mellan framsätena eller bildörrarna.
- Selen får inte vara vridna eller fastklämda och måste spännas åt.
- Efter en olycka får bilbarnstolen inte användas igen.
- Sätt alltid på säkerhetsbältet på ditt barn.
- Kontrollera före varje körning att bälteslåset är korrekt låst och att fotstödet är korrekt placerat.
- Se också till att alla fasta föremål och plastdelar på HERO-XL är placerade så att de inte kan fastna i ett rörligt säte eller i en dörr vid daglig användning av fordonet.
- Vi rekommenderar att bagage och andra föremål säkras ordentligt.
- Bilbarnstolen får inte användas utan överdraget.
- Observera att bilbarnstolen kan bli för varm för ditt barns hud om den står i solen utan textilöverdrag under en längre tid.
- Skyddsöverdraget får endast bytas ut mot ett originalöverdrag från HERNIK.
- Lämna inte ditt barn utan uppsikt i bilbarnstolen.
- Gör inga ändringar eller tillägg på produkten.
- Följ noggrant installationsanvisningarna från HERNIK.
- Bruksanvisningen ska alltid finnas i fordonet.

2.Säkerhet & montering i fordon

2.3 Användning i fordon

HERO-XL rehabiliteringsbilbarnstol får endast installeras bakåtvänd. Den passar på de flesta, men inte alla, säten. Se bruksanvisningen för din bil för information om vilka bilsäten som är godkända enligt ECE R16 för användning av barnsäkerhetssystem.

Användningsmöjligheter HERO-XL (i-SIZE):

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Rücksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	JA
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt	NEIN
Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN



VIKTIGT! Om du vill installera din HERO-XL barnstol på en sittplats med frontkrockkudde måste krockkudden avaktiveras enligt fordonstillverkarens anvisningar. Observera att på vissa fordon kan krockkudden endast avaktiveras av en auktoriserad servicecenter.

2.4 Nedre fästpunkter

Spännband framåt används för att förbättra skyddet för barn i bilar genom att möjliggöra en fast och stabil installation av bältesfäste för bakåtvända barnstolar. Denna fästning ökar säkerheten för ditt barn vid alla typer av kollisioner, inklusive vältning och påkörning.


Spännbanden garanterar en passande och enkel installation i fordon med förinstallerade nedre fästpunkter. Förinstallerade nedre fästpunkter i fordon finns ofta på golvmonterade sätesskenor, men andra positioner är också möjliga. Mer information om användbara fästpunkter finns i bruksanvisningen för din bil. Om din bil inte har nedre fästpunkter kan du använda de extra remmarna för nedre fästning (S) som medföljer HERO-XL.

Installationsanvisningarna finns i denna bruksanvisning.

VIKTIGT! Använd aldrig HERO-XL utan spännremmarna fram. De är en viktig säkerhetsfunktion och måste alltid användas när du installerar barnstolen.


2.Säkerhet & montering i fordon

2.5 Montering av spännremmar

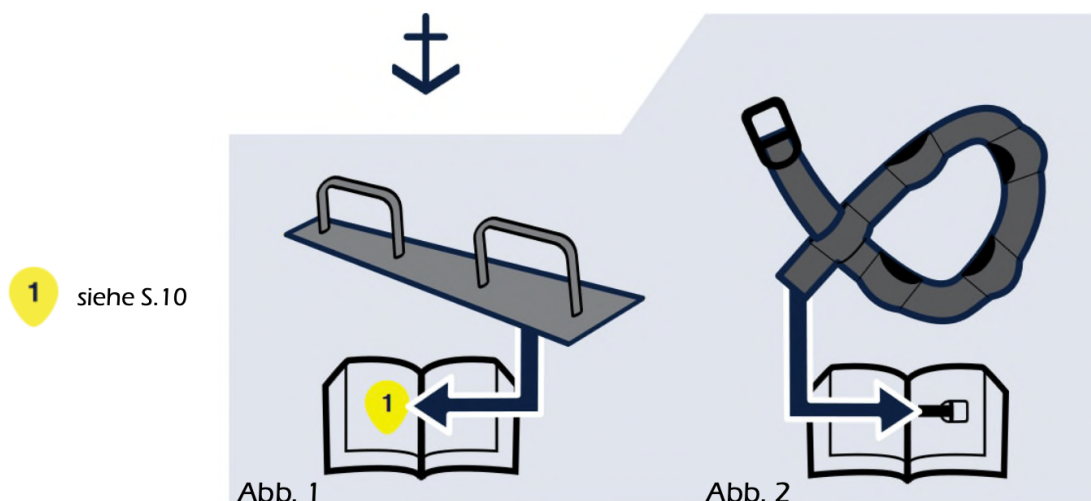

Om din bil inte har lämpliga förinstallerade nedre fästpunkter (fig. 1) kan du använda de nedre fästremmarna som medföljer HERO-XL (fig. 2). Beroende på fordon och den sittposition där du vill installera barnstolen finns det olika möjliga fästpunkter för att fästa remmarna (se nästa sida):

För att installera remmarna för nedre fästpunkter (S) för du helt enkelt remmen runt den valda fästpunkten och för metallfästet genom en av slitsarna på remmen (fig. 3). Fästremmen har flera slitsar som kan användas. Se till att använda det spår som ligger närmast metallfästet för att installera metallfästet så nära bilens golv som möjligt. Dra sedan i metallankaret för att spänna remmen och upprepa proceduren för den andra remmen. Använd alltid två fästpunkter vid montering av HERO-XL, som dessutom bör vara åtskilda från varandra, eftersom detta ger en stabilare installation.

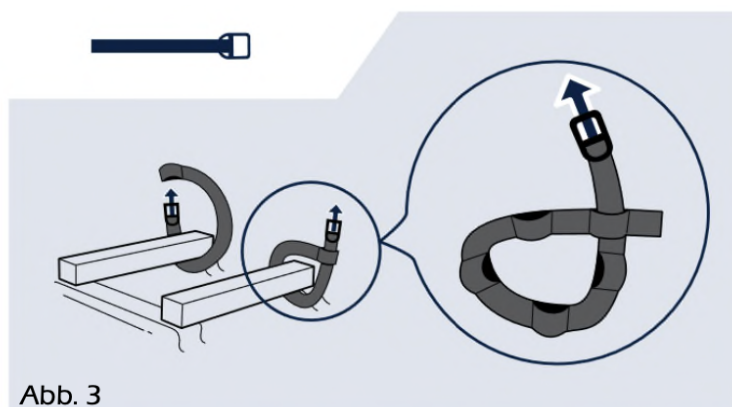

Alternativ för ledning av fästremmen:

2.Säkerhet & montering i fordon


alt. a) För remmen runt kanten på den förinstallerade fästpunkten (använd endast denna metod om de förinstallerade fästpunkterna inte passar direkt med de nedre hållremmarna).

alt. b) Fäst remmen runt sätesrälingen framför barnstolen genom att föra remmen mellan sätesrälingen och fordonsgolvet eller genom ett lämpligt hål i sätesrälingen.

alt. c) Fäst bältet runt bilstolens sittdel framför barnstolen genom att föra bältet mellan bilstolens ryggstöd och sittdynan.

alt. d) Fäst bältet runt sätesskenan under barnstolen genom att föra bältet mellan sätesskenan och fordonsgolvet eller genom ett lämpligt hål i sätesskenan.

alt. e) Om HERO-XL monteras på ett passagerarsäte och inget av ovanstående alternativ är möjligt, kan du fästa remmarna för den nedre fästsättningen vid en lämplig fästpunkt i fordonets bakre del och föra remmarna under fordonets säte till fordonets främre del. Se till att fästremmarna inte syns på framsidan av sätet utan på sidorna.

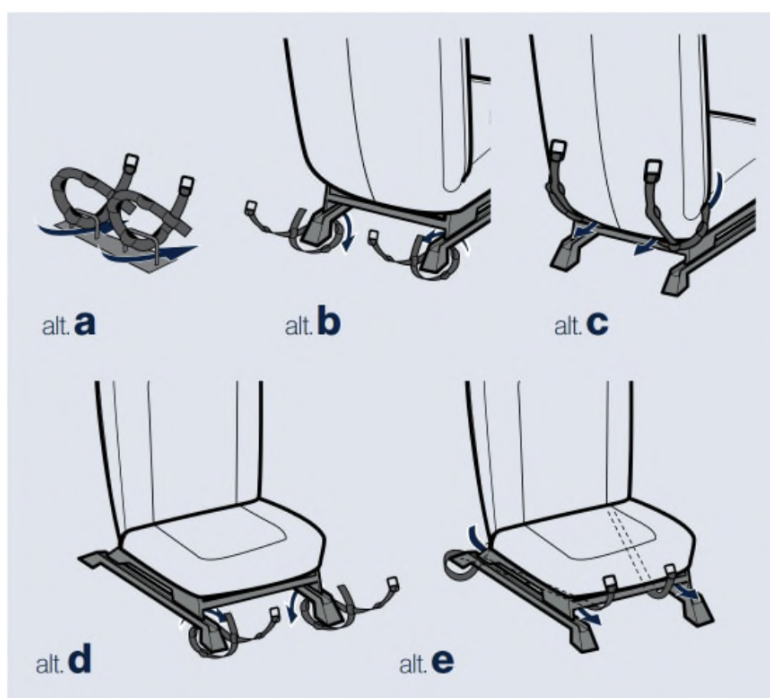


2.Säkerhet & montering i fordon

2.6 Montering i fordonet

1) Öppna dragkedjan och öppna locket till bältesklämman (O).


2) Placera HERO-XL på fordonets säte med barnstolens baksida mot fordonets framsida. Justera benutrymmet för ditt barn genom att helt enkelt flytta barnstolen framåt och bakåt på fordonets säte. HERO-XL kan installeras tätt intill fordonets ryggstöd, men får aldrig installeras så att hälen (J) hänger över fordonets sätes kant. Se till att den vertikala linjen (K) på hälen (J) aldrig korsar fordonets sätes kant.

Justera barnstolens sittvinkel genom att trycka på spaken för lutningsvinkel (G) och välja en lämplig sittvinkel. Välj en så upprätt position som möjligt för maximal säkerhet och se samtidigt till att barnets huvud inte faller framåt när det sover. Av komfort- och säkerhetsskäl bör lutningsvinkeln justeras till en mer upprätt position när barnet växer. Observera att barnstolen lutar något mer bakåt när spännbanden (M) spänns, eftersom den sjunker ner i bilstolens stoppning. När HERO-XL monteras på ett passagerarsäte är det möjligt, men inte nödvändigt, att barnstolens baksida kommer i kontakt med instrumentbrädan.

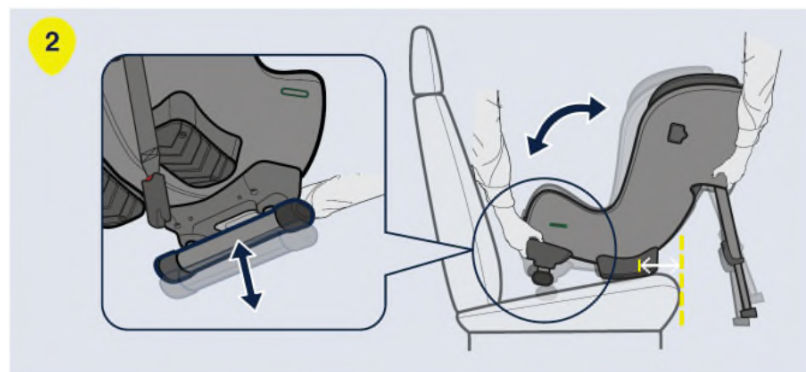


3) Öppna bältesklämman (N). Dra ut en armlängd av bilbältet och för det genom den säkerhetsbältesslits som ligger närmast dig (D). För bältet genom bältesklämman (N) och sedan genom säkerhetsbältesslitsen (D) på motsatt sida. Spänn fast bilbältet med hjälp av spännet och dra kraftigt i axeldelen av bilbältet så att det sitter spänt och barnstolen är ordentligt fastsatt. Ju hårdare du drar, desto fastare sitter installationen. När barnstolen är ordentligt fastspänd stänger du bältesklämman (N) och låser bilbältet i sitt läge. Se till att både axel- och höftbältet är låsta tillsammans i bältesklämman (N). Stäng bältesklämmans lock (O) och stäng dragkedjan. För att få en ännu fastare och stabilare fastsättning trycker du ner barnstolen medan du drar i säkerhetsbältets axelparti.

2.Säkerhet & montering i fordon

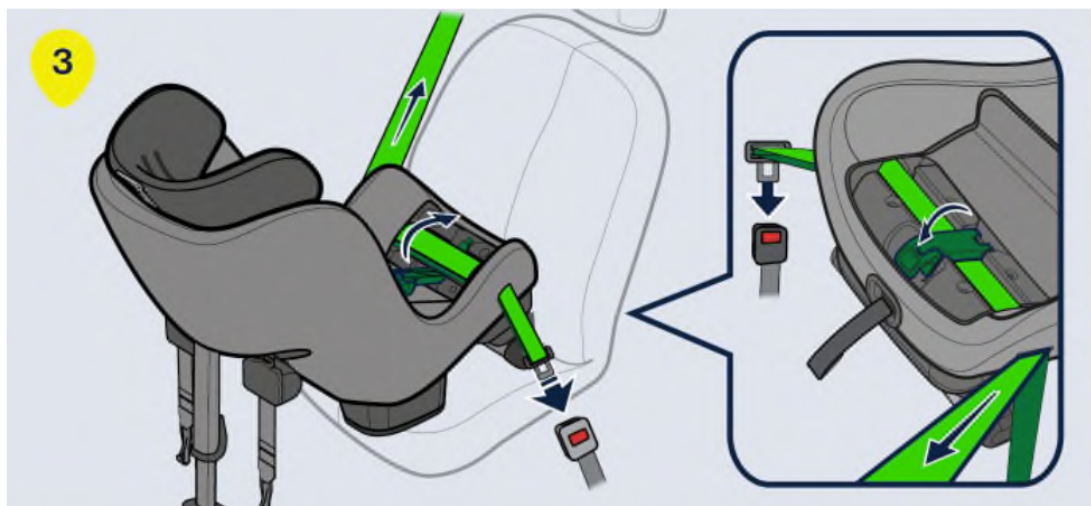


4) Dra ut spännbanden (M) ur barnstolen och fäst dem i de nedre fästpunkterna i bilen. Mer information finns i avsnittet "Nedre fästpunkter" på sidan 10 i denna bruksanvisning. Tryck ner barnstolens ovansida och skaka barnstolen från sida till sida. HERO-XL:s självspännande remmar (M) spänns då automatiskt. Genom att spänna remmarna (M) ställer du också in barnstolens slutliga lutningsvinkel. Tryck på barnstolen tills den sitter fast ordentligt och du har uppnått en lämplig sittvinkel. Kontrollera att den vita markeringen på det nedre fästremmen är synlig. Om den inte är det sitter de nedre fästpunkterna för nära barnstolen och måste justeras. Om detta inte är möjligt kan du också korsa spännremmarna bakom sätet för att få lite mer avstånd.

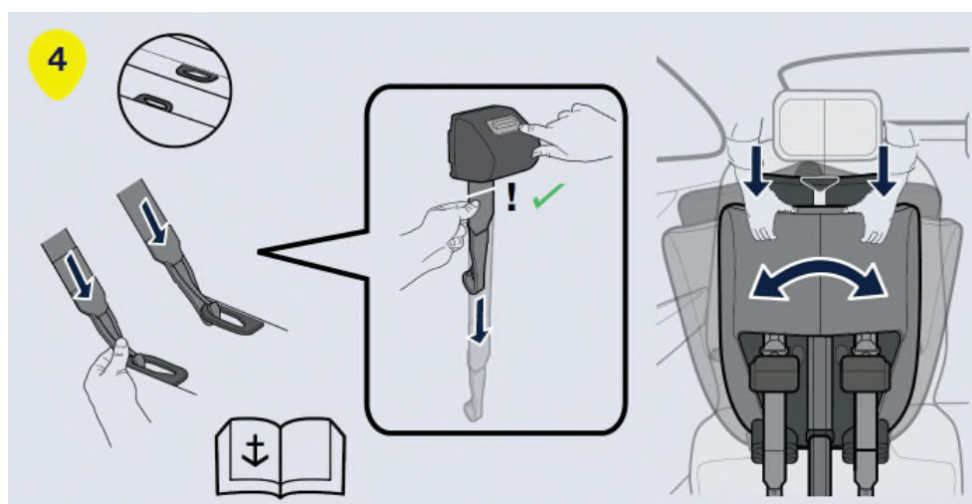


5) Dra ut stödbenet (P) ur barnstolen. Tryck på stödbenets knapp (Q) och dra stödbenet (P) nedåt tills det vidrör bilens golv. Släpp stödfotknappen (Q) och lyft barnstolen uppåt för att fälla ut stödfoten (P) ytterligare tills du hör ett klickljud. Stödbenet (P) ska nu vara låst och

3. Hantering av basmodellen

tryckt fast mot bilgolvet. Se till att stödbenet (P) är lutat ca 10° mot bilens framsida. Kontrollera igen att bilens säkerhetsbälte fortfarande är spänt och att höftbältet inte har lossnat när de nedre hållremmarna och stödbenet spänns. Om bilbältet har tappat lite spänning, spänn det igen genom att upprepa steg 2 i denna instruktion utan att lossa spännremmarna.

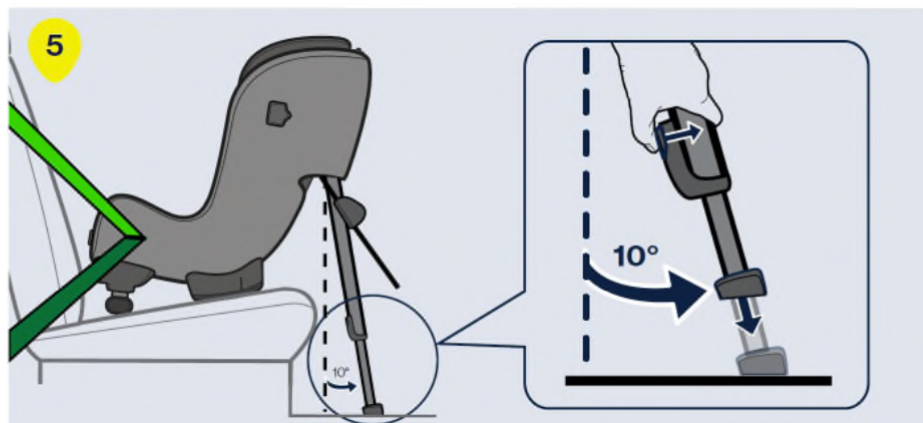

6) Skjut in ASIP (I) i spåren på ASIP-kontakten (L) och tryck nedåt tills ASIP (I) låser fast. Om det finns en plastkåpa på ASIP-kontakten (L), ta bort den och placera den på ASIP-kontakten (L) på motsatt sida av sätet innan du monterar ASIP (I). Se till att ASIP (I) är monterad på den sida av HERO-XL-barnstolen som är närmast fordonsdörren.

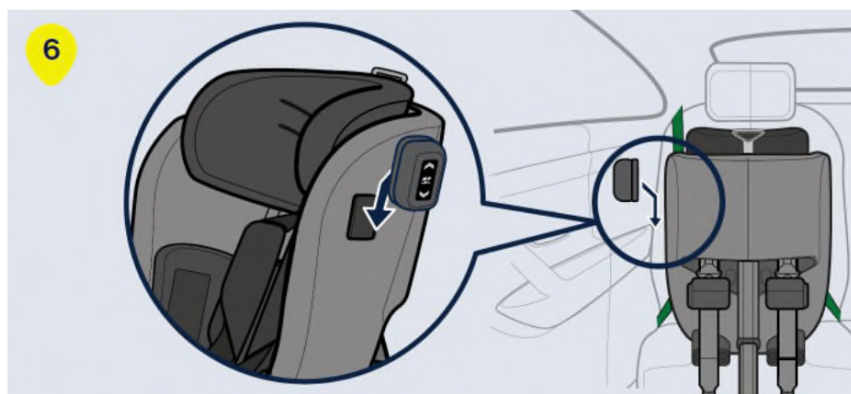

3 Hantering av basmodellen

3.1 Spänna fast barnet

Innan du spänner fast ditt barn i HERO-XL-barnstolen, kontrollera att rätt inlägg finns i stolen. HERO-XL är utvecklad för att växa med ditt barn och garantera en bekväm och säker sittplats för barn. Vi rekommenderar att du använder inlägget tills det blir för trångt för ditt barn.

HERO-XL är utrustad med ett automatiskt nackstöd (A) som automatiskt sänks till rätt position när den integrerade säkerhetsbältet spänns fast. För att säkerställa en optimal position rekommenderar HERNIK att du använder denna funktion varje gång du spänner fast ditt


3. Hantering av basmodellen

barn. Innan du sätter ditt barn i barnstolen, se till att det automatiska nackstödet (A) är i olåst läge.

7) Se till att huvudstödet bromsspak (H) är i olåst läge. Om spaken är i låst läge, tryck den till olåst läge.




8) Lossa den integrerade säkerhetsbältet genom att trycka på bältesutlösaren (E) och dra ut båda axelremmarna (R) samtidigt. Undvik att dra i endast en rem, eftersom detta kan göra axelremmarna (R) ojämna. Se till att nackstödet (A) är i det högsta läget:

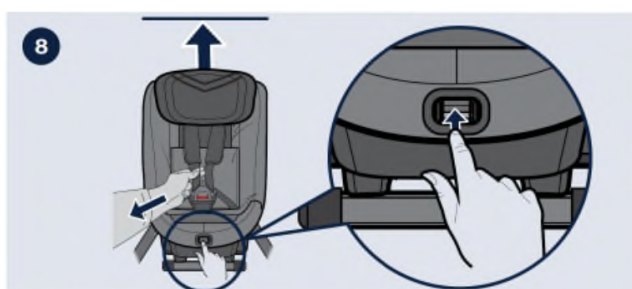


3.Hantering av basmodellen

9) Lås upp bälteslåset genom att trycka på låsöppningsknappen (C) och placera bälten utanför sätet.

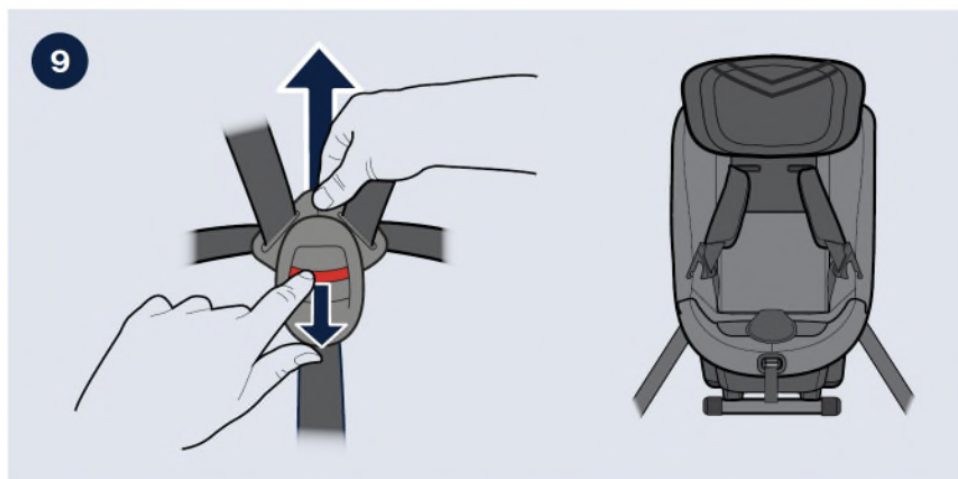


10) Sätt barnet i sätet och lägg axelremmarna (R) över barnets axlar. Lås det integrerade säkerhetsbältet genom att först föra samman de delar av låset som är fästa vid axelremmarna (R) och sedan skjuta dem in i låset tills du hör ett klick.

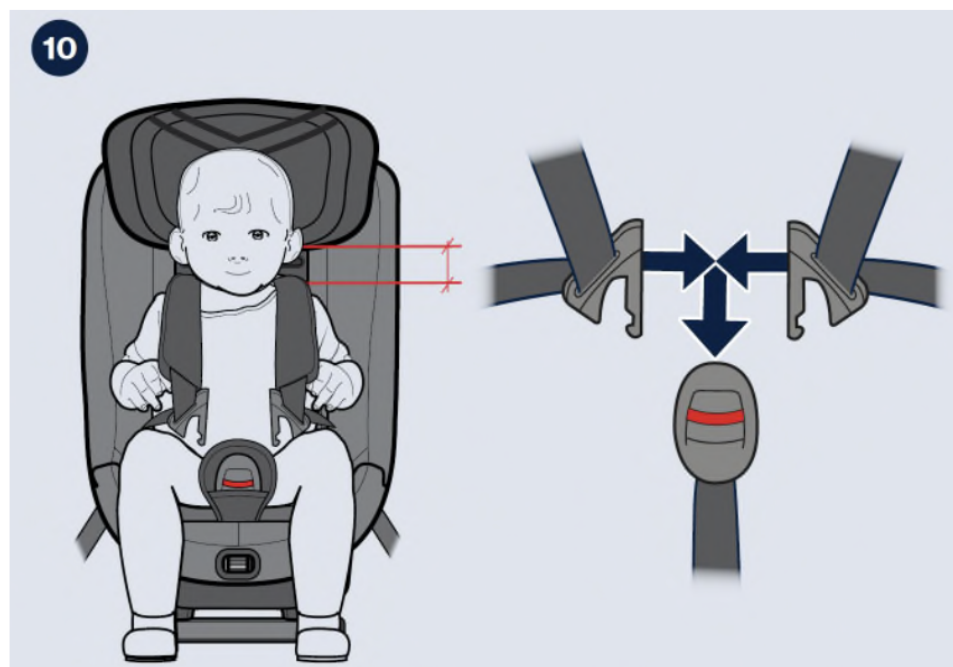

3.Hantering av basmodellen

11) Dra i axelremmarna (R) för att spänna den integrerade säkerhetsbältet över barnets höfter. Med axelremmarna (R) spända drar du spännaren (F) rakt bort från barnstolen tills remmen sitter tillräckligt spänd. Det ska inte gå att få in mer än ett finger mellan axelremmarna (R) och barnets axlar. När remmen spänns flyttas nackstödet (A) automatiskt nedåt till en position som passar ditt barn.

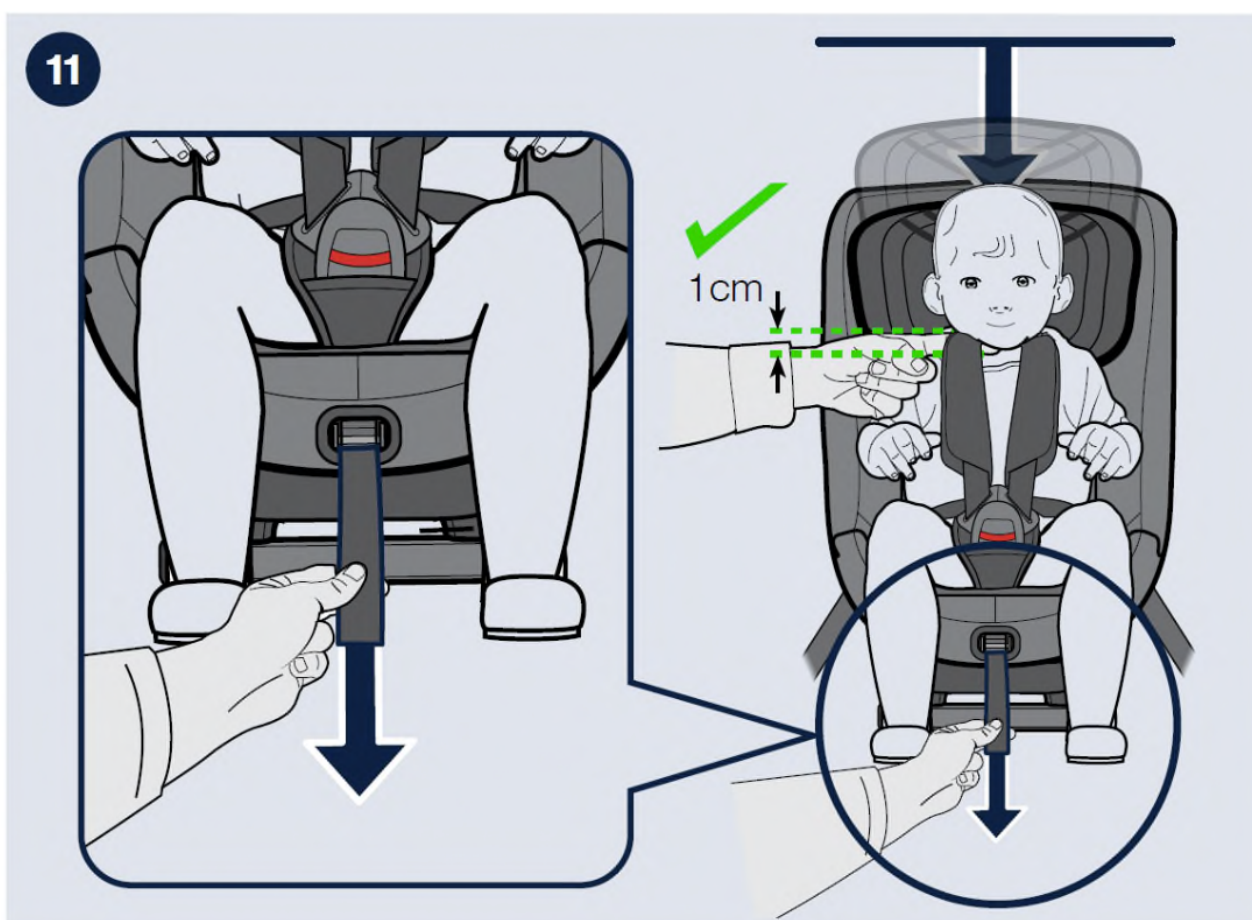

3. Hantering av basmodellen

3.2 Justering av nackstödet

HERO-XL är utrustad med ett automatiskt nackstöd (A) som ser till att nackstödet (A) alltid är i rätt läge för ditt barn. När den integrerade säkerhetsbältet spänns sänks nackstödet (A) till rätt höjd och låses automatiskt. När bältet lossas återgår huvudstödet (A) till sitt högsta läge och låses upp. För att säkerställa en optimal position rekommenderas att denna funktion används varje gång du spänner fast ditt barn.

Huvudstödet (A) låses endast upp i sitt högsta läge. Se därför till att huvudstödet (A) återgår till sitt högsta läge när du lossar den integrerade säkerhetsbältet, eftersom huvudstödet (A) annars förblir låst och inte rör sig nedåt när bältet spänns. Om du vill inaktivera den automatiska justeringen och hålla nackstödet (A) i ett fast läge, ställer du nackstödet (A) i önskat läge och flyttar nackstödet bromshandtag (H) till låst läge. Nackstödet (A) är nu låst i rätt höjd och rör sig inte längre förrän du återför bromshandtaget för nackstödet (H) till olåst läge.

Om du använder din HERO XL med fast huvudstöd (A) ska du se till att huvudstödet (A) är i rätt läge för ditt barn. Kontrollera att axelremmarna (R) går direkt över barnets axlar eller högst 1 cm ovanför axlarna genom sätet. Om så inte är fallet, justera huvudstödet (A) genom att sätta huvudstödet bromshandtag (H) i olåst läge och skjuta huvudstödet (A) uppåt för att låsa upp det, och upprepa sedan proceduren.

OBS! När huvudstödet är utdraget kan ryggstödet fällas ut (fig. 1). Så snart huvudstödet höjd sänks måste ryggstödet fällas tillbaka (fig. 2).



Abb. 1

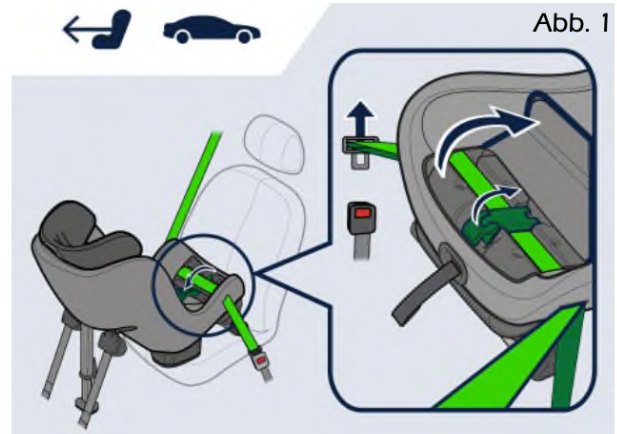


Abb. 2


3. Hantering av basmodellen

3.3 Demontering från fordonet


1) Öppna dragkedjan och öppna locket till bältesklämman (O). Lås upp bilbältet genom att trycka på den röda knappen på bälteslåset. Öppna bältesklämman (N) och dra bilbältet genom bälteslitsarna (D) för att ta bort det från barnstolen (fig. 1).



2) Lås upp de nedre hållremmarna (M) genom att hålla fast kopplingsdelarna med handen och trycka på den röda knappen med tummen. Håll kopplingsdelen i handen och för den långsamt tillbaka till barnstolen. Se till att du inte släpper kopplingsdelen på den nedre hållremmen, eftersom den dras tillbaka automatiskt med hög hastighet (fig. 2).

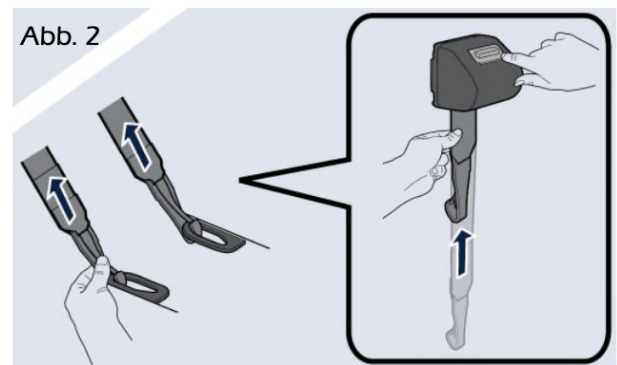

3) Tryck på stödfotsknappen (Q) och för stödfoten (P) till sitt kortaste läge (fig. 3).

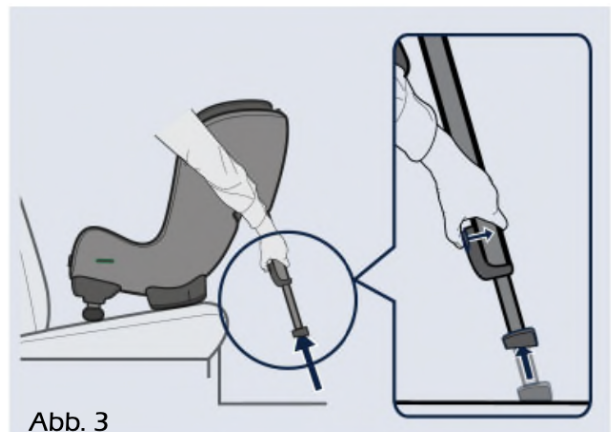

3. Hantering av basmodellen

4) Tryck på spaken för inställning av sittvinkeln (G) och tryck inställaren för sittvinkeln (T) till det kortaste läget. Lyft ut HERO-XL ur fordonet.

TIPS! Lås bälteslåset och spänn fast bältet innan du tar ut barnstolen ur fordonet. Du kan sedan använda axelremmarna (R) som bärhandtag för att lättare lyfta ut barnstolen och transportera den utanför fordonet.

VIKTIGT! Bär aldrig barnstolen i nackstödet (A).

3.4 Skötsel och underhåll

Allmänna skötsel- och underhållsråd

För att säkerställa att barnstolen ger fullt skydd:

- Vid en olycka med en kollisionshastighet över 10 km/h kan barnstolen skadas utan att skadan är omedelbart synlig. I så fall måste barnstolen bytas ut. Kassera den på rätt sätt.
- Kontrollera regelbundet alla viktiga delar för skador. Se till att alla mekaniska delar fungerar korrekt.
- För att undvika skador, se till att barnstolen inte fastnar mellan hårda föremål (bildörr, sätesräcken etc.).
- Låt alltid barnstolen kontrolleras om den har skadats (t.ex. om den har fallit i golvet).
- Smörj eller olja aldrig delar av barnstolen.
- För att barnstolen ska kunna skydda ditt barn på rätt sätt är det absolut nödvändigt att du monterar och använder HERO-XL exakt enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.

4. Användning av tillbehör (tillval)

4 Användning av tillbehör (tillval)

4.1 Bröstkorgskuddar

Bröstkorgskuddar hjälper ditt barn att stabilisera överkroppen om kontrollen över bålen är nedsatt. Kuddar fästs på en monteringsplatta med hjälp av kardborreband. De kan lossas med lätt kraft. När du har hittat en optimal position ska kuddarna fästas igen genom att trycka dem mot ryggen och vrida dem något. Överdragen till bröstkorgskuddarna är avtagbara och tvättbara.



4.2 Abduktionskil

Abduktionskilen hjälper ditt barn att hålla benen i en kontrollerad position. Den är fäst på en stabil monteringsram och kan justeras i djup och höjd med hjälp av snabbspännhandtag. Överdraget på abduktionskilen är avtagbart och tvättbart.



4. Användning av tillbehör (tillval)

4.3 Sittdjupsadapter

Med hjälp av sittdjupsadaptern (1) kan sittdjupet förlängas med ca 10 cm. På så sätt kan HERO-XL även användas för större barn.

Sittdjupsadaptern är fäst på en stabil monteringsram och kan justeras i djupet med hjälp av snabbspännhandtag (2).

Överdraget är avtagbart och tvättbart.



4.4 Stöd- och säkerhetsvaddering

Stöd- och säkerhetsdynan (1) gör att ditt barn kan vila armarna och därmed stabilisera överkroppen.

Den fästs med två kardborreband på ryggdelen av sätet.

Överdraget är avtagbart och tvättbart.



5.Garanti

5 Garanti

HERNIK-produkter är tillverkade enligt den senaste tekniken och strikta kvalitetsnormer. Om du i undantagsfall har anledning att reklamera något garanterar GmbH i enlighet med HERNIK:s allmänna villkor efter leverans

- 24 månader på alla fasta komponenter
- 12 månader på alla rörliga delar

För specialtillverkade produkter kan ingen garanti ges, såvida dessa inte beror på tillverknings- eller materialfel. I detta fall ersätts den reklamationsberättigade produkten inom 12 månader.

Anspråk enligt denna garanti förutsätter att enheten har använts korrekt och i enlighet med bruksanvisningen.


Vid konstruktiva ändringar, efterbearbetning eller felaktig reparation utan föregående överenskommelse med GmbH upphör HERNIK:s garanti att gälla.

Ytterligare anspråk, oavsett rättslig grund, särskilt ersättning för indirekta eller direkta skador, är uteslutna.

6.Märkning

6 Märkning

På baksidan finns följande märkning:

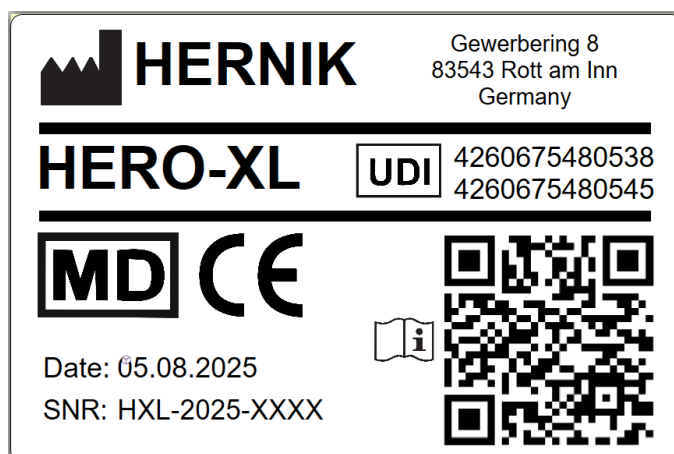

**Restraint device for special
requirements "S" (EN)**

Please read the user manual
before use!

7.Tekniska

7 Tekniska

HERO-XL	
SITZBREITE (Becken)	24 cm
SITZBREITE (Knie)	27 cm
SITZTIEFE	25 - 34 cm
RÜCKENHÖHE	28 - 45 cm
SCHEITELHÖHE	48 - 68 cm
Höhe Thoraxpelotten	13 - 20 cm
Gesamthöhe	65 - 82 cm
Gesamtbreite	43 cm
Gesamttiefe	55 cm
getestete Belastbarkeit	36 kg

anteckningar

anteckningar



HERNIK GmbH
Gewerbering 8
83543 Rott am Inn • Germany

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**