

# Gebruiksaanleitung

# KIDSFLEX **PRO**



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>4</b>
1.1	Vorwort	4
1.2	Zweckbestimmung und Indikation	5
1.3	Hinweise	5
1.4	Konformitätserklärung	5
1.5	Gewährleistungsbedingungen	5
1.6	Service und Reparaturen	6
1.7	Gebrauchsschulung	6
1.8	Einbau ins Auto	6
1.9	Sicherung durch den 3-Punkt-Gurts des PKWs	7
1.10	Konformitätserklärung	9
1.11	Freigabe/Kompatibilität hinsichtlich der Kombination mit handelsüblichen Autokindersitzen	10
1.12	Kontraindikationen	10
<b>2</b>	<b>SICHERHEITSHINWEISE</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>HANDHABUNG DES GRUNDMODELLS</b>	<b>12</b>
3.1	Einstellen der Kopfstütze	12
3.2	Einstellen der Sitztiefe	12
3.3	Einstellen des Rückenwinkels	13
3.4	Einstellen der Schulterführungspelotten	13
3.5	Einstellen der Thoraxpelotten	13
3.6	Handhabung des verstellbaren Rückens	15
<b>4</b>	<b>VERWENDUNG DES OPTIONALEN ZUBEHÖRS</b>	<b>16</b>

# Inhaltsverzeichnis

4.1	Einbau im Auto – mit ISOFIX	16
4.2	Stütz- und Sicherheitspolster	18
4.3	Abduktionskeil	19
4.4	Sitzschrägverstellung	19
4.5	Drehadapter	20
4.6	Einstellung der Beinführungen	21
4.7	Fußbank / Fußstützrolle	21
4.8	Schutzmatte	22
4.9	Verbindungsgurt für Schultergurte	22
5	GARANTIE	23
6	KENNZEICHNUNG	24
7	WARTUNG & PFLEGE	25
7.1	Abziehen des Bezugs	25
8	TECHNISCHE DATEN	26

# 1. Allgemeine Informationen

## 1 Allgemeine Informationen

### 1.1 Vorwort

Sie haben sich für den Autositz KIDSLFEX-PRO entschieden und erhalten hiermit ein hochwertiges Produkt aus unserem Hause. Wir möchten Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen danken.

Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben und es Ihnen den Alltag erleichtert, stellen wir Ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Sie zeigt Ihnen die korrekte und einfache Bedienung sowie die erforderliche Pflege und Wartung. Um Schäden durch Bedienungsfehler zu vermeiden und eine optimale Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig durch. Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Wir wünschen Ihnen eine problemlose Nutzung und hoffen, dass unser Produkt Ihren Erwartungen entspricht.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen an der in dieser Anleitung beschriebenen Version vorzunehmen.

Bevor Sie das Gerät in Ihr Fahrzeug einbauen und zum ersten Mal benutzen, lesen und befolgen Sie bitte die Einbauanleitung auf den Seiten 4 - 6. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Gebrauchsanweisung beim Produkt verbleibt und somit jedem, der den Sitz benutzt, zur Verfügung steht.

Ihre HERNIK GmbH

# 1. Allgemeine Informationen

## 1.2 Zweckbestimmung und Indikation

Der KIDSFLEX-PRO wurde für den Transport von Kindern mit besonderen Bedürfnissen (GMFCS 3-5; Beispielsweise ausgeprägte muskuläre Hypotonie mit fehlender Kopf- und Rumpfkontrolle) in Fahrzeugen entwickelt. Kinder mit schlechter Kopf- und Rumpfkontrolle (z. B. infantile Cerebralparese, Muskeldystrophie, Hypotonie) können mittels individuell positionierbarer Thoraxpelotten und spezieller Polster in deren Haltung unterstützt werden, wodurch ein sicherer Transport gewährleistet werden kann.

Durch wichtiges optionales Zubehör kann im Einzelnen auf spezielle Aspekte eingegangen werden, z. B. auf die Sitzneigung oder der Installation eines stabilen Abduktionskeils oder einer Fußbank. Mehr dazu im Kapitel 4.

## 1.3 Hinweise

Der KIDSFLEX-PRO Reha-Kinderautositz wird zur Verwendung auf dem Rücksitz eines PKW gebaut und setzt einen vorhandenen, funktionierenden 3-Punkt-Sicherheitsgurt voraus. Der Sitz kann sowohl hinter dem Beifahrer als auch hinter dem Fahrersitz angebracht werden.

Neben dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt Ihres Autos, ist der Kinderautositz mit einem 5-Punkt Brust-Schultergurt ausgestattet, der Ihrem Kind zusätzlichen Halt bietet.

## 1.4 Konformitätserklärung

Die HERNIK GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der Autokindersitz IPAI mit den grundlegenden Anforderungen (Anhang 1 der Richtlinie 93/42 EWG) übereinstimmt. Das Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen nach der oben genannten Richtlinie gekennzeichnet.

## 1.5 Gewährleistungsbedingungen

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Für Schäden, die durch Bauteile und Ersatzteile verursacht werden, die nicht vom Hersteller freigegeben wurden, haftet der Hersteller nicht.

# 1. Allgemeine Informationen

## 1.6 Service und Reparaturen

Service und Reparaturen am KIDSFLEX-PRO dürfen nur vom Fachhandel durchgeführt werden. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren zuständigen Fachhändler. Bei Reparaturen erhalten Sie dort ausschließlich Original-Ersatzteile.

## 1.7 Gebrauchsschulung

Der Autositz wird komplett montiert geliefert. Bei Auslieferung weist der Fachhändler den Benutzer, unter Zuhilfenahme der Gebrauchsanweisung, in den Gebrauch des Hilfsmittels ein. Der Fachhändler sollte gemeinsam mit dem Benutzer den Autositz in den PKW einbauen und falls vorhanden den Isofix-Bügel oder den Klemmbügel einstellen.

Wenn Sie den Autositz einbauen, fassen Sie ihn am besten mit der einen Hand vorne mittig, und mit der anderen seitlich oben an. Um eine optimale Sitzposition zu erreichen, ist es notwendig den Autositz individuell auf die Gegebenheiten des Kindes einzustellen. Dies sollte grundsätzlich vom Fachhändler erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass ein ISOFIX-Adapter nicht vorgeschrieben ist, da dieser nicht sicherheitsrelevant ist.

## 1.8 Einbau ins Auto

Setzen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz. Achten Sie darauf, dass die Rückenlehne flach an der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes anliegt.

Wenn eine Sitz-Schrägverstellung eingestellt ist, ist dies nicht möglich. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass der Sitz so nah wie möglich an der Rückenlehne aufliegt.

**Tipp!** Wenn die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes stört, entfernen Sie diese.



# 1. Allgemeine Informationen

## 1.9 Sicherung durch den 3-Punkt-Gurts des PKWs

Um die enormen Kräfte bei einem Unfall aufnehmen zu können, muss der KIDSFLEX-PRO mit dem Dreipunktgurt des Fahrzeugs gesichert werden.

Eine ISOFIX-Verbindung allein genügt nicht.

1. Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz.
2. Ziehen Sie den Fahrzeuggurt heraus und führen Sie ihn (vor Ihrem Kind) zum Gurtschloss.

**ACHTUNG!** Achten Sie darauf, dass der Fahrzeuggurt nicht verdreht ist, da sonst die volle Schutzwirkung des Rückhaltesystems nicht mehr gegeben ist.

3. Rasten Sie die Gurtschlosszunge im Fahrzeugschloss mit einem KLICK ein.
4. Legen Sie den Diagonalgurt und den Beckengurt auf der Seite des Fahrzeugschlosses in die dunkelgrüne Gurtführung des Fahrzeugsitzes.
5. Legen Sie den Beckengurt auf der anderen Seite des Sitzpolsters ebenfalls in die dunkelgrüne Gurtführung.

**VORSICHT!** Der Beckengurt muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über die Hüften Ihres Kindes verlaufen.

6. Führen Sie den Diagonalgurt in den dunkelgrünen Gurthalter unter der Kopfstütze ein, bis er vollständig und unverdreht im Gurthalter liegt.
7. Achten Sie darauf, dass der Diagonalgurt über das Schlüsselbein Ihres Kindes verläuft und nicht den Hals berührt.

Prüfen Sie vor jeder Fahrt, ob...

- der Kindersitz sicher befestigt ist,
- der Beckengurt auf beiden Seiten des Fahrzeugsitzes in den dunkelgrünen Gurtführungen verläuft,
- der Diagonalgurt auf der Seite des Gurtschlosses ebenfalls in der dunkelgrünen Gurtführung des Autositzes verläuft,
- der Diagonalgurt durch die dunkelgrüne Gurtführung der Kopfstütze läuft,

## 1. Allgemeine Informationen

- der Diagonalgurt diagonal nach hinten verläuft,
- die Gurte straff und nicht verdreht sind.





# 1. Allgemeine Informationen

## 1.10 Konformitätserklärung



Gewerbering 8  
83543 Rott am Inn  
info@hernik.de  
www.hernik.de  
+49 8035-9580448  
+49 8035-9580446

### Konformitätserklärung

**Hersteller:** HERNIK GmbH  
**Adresse:** Gewerbering 8 83543  
Rott am Inn Deutschland



**SNR:** DE-MF-000011257

**Produkt:** Autokindersitz für körperlich behinderte Kinder

**Typenbezeichnung:** Kidsflex Pro 1 / 2

UDI-PI	Bezeichnung	Artikelnummer
4260675480620	KIDSFLEX-PRO 1, grau-schwarz	360000-D1
4260675480637	KIDSFLEX-PRO 1, rot-schwarz	360000-D2
4260675480644	KIDSFLEX-PRO 2, grau-schwarz	370000-D1
4260675480651	KIDSFLEX-PRO 2, rot-schwarz	370000-D2

**Klassifizierung Med. Dev.:** Es handelt sich um ein medizinisches Produkt der Klasse I gemäß den Klassifizierungsregeln in Anhang VIII

**Zweckbestimmung:** Transport von körperlich behinderten Kindern (GMFCS 3-5; Beispielsweise ausgeprägte muskuläre Hypotonie mit fehlender Kopf- und Rumpfkontrolle) zwischen 100-150cm (IPAI-MAX) / 100-125cm (IPAI-MINI) und bis 36 kg in Fahrzeugen mittels 3-Punkt-Gurt

Ich, der Unterzeichner, erkläre in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt mit den grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen (Anhang 1 der MDR (EU) 2017/745) übereinstimmt. Die Konformitätsbewertung wurde in Übereinstimmung mit Anhang IV der MDR (EU) 2017/745 durchgeführt. Das Produkt ist mit dem CE-Zeichen gemäß der oben genannten Richtlinie gekennzeichnet.

- Anhang 1 der MDR (EU) 2017/745
- ECE-R129/04 Prüfnorm für Autokindersitze

Rott am Inn, 01.12.2025

Andrés Moncayo



Ort, Datum

Name

Unterschrift

Gewerbering 8  
83543 Rott am Inn  
Deutschland

HBR 125064  
St.-Nr.: 9143 813 37744  
USt.-IdNr.: DE201281298

Stadtparkasse München  
IBAN: DE12 7015 0000 0019 1406 72  
BIC: SSKMDEMM

GESCHÄFTSFÜHRER:  
Markus Jacksch  
Gerichtsstand: München

# **1. Allgemeine Informationen**

## **1.11 Freigabe/Kompatibilität hinsichtlich der Kombination mit handelsüblichen Autokindersitzen**

Der KIDSFLEX-PRO ist ein zugelassener Autokindersitz inkl. aller Zubehörteile nach ECE R129/04. Einzelteile und Zubehörteile des KIDSFLEX-PRO sind nicht für die Kombination mit anderen handelsüblichen Autokindersitzen freigegeben. Durch eine Änderung könnte die Zulassung des KIDSFLEX-PRO wie auch die des handelsüblichen Autokindersitz erlöschen.

## **1.12 Kontraindikationen**

Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

## 2. Sicherheitshinweise

### 2 Sicherheitshinweise

- Vor der Benutzung müssen die Komponenten auf einwandfreie Funktion und Zustand überprüft werden.
- Die Sicherheit Ihres Kindes ist nur dann gewährleistet, wenn der Sitz korrekt eingebaut und das Kind genau fixiert ist.
- Die Gurte müssen straff und ohne Verdrehung angelegt werden.
- Der 3-Punkt-Sicherheitsgurt ist durch die dafür vorgesehenen Gurtführungen zu führen und soll den Sitz straff umschließen.
- Bitte prüfen Sie:
  - A) ob der Sicherheitsgurt sicher in der Gurtführung liegt
  - B) ob die Gurtschlösser richtig verschlossen sind
  - C) dass keine Textilien eingeklemmt sind
- Achten Sie darauf, dass sich keine festen Gegenstände wie Stecknadeln, Gurtschlösser etc. zwischen Kind und Sicherheitsgurt befinden. Dies könnte bei Unfällen zu Verletzungen führen.
- Erklären Sie Ihrem Kind, wie wichtig es ist, gut angeschnallt zu sein und dass sich der Verlauf der Gurte nicht verändert. Es soll weder an den Gurten ziehen noch die Gurtschlösser öffnen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Autositz vor, sonst gefährden Sie die Sicherheit Ihres Kindes.
- Der Autositz darf nicht durch bewegliche Teile im Auto oder durch Türen beschädigt werden.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals allein im Kindersitz sitzen.
- Informieren Sie Ihre Mitfahrer, wie Ihr Kind nach einem Unfall aus dem Sitz genommen werden kann.
- Nach einem Unfall muss der gesamte Kinderautositz erneuert werden.

## 3. Handhabung des Grundmodells

### 3 Handhabung des Grundmodells

#### 3.1 Einstellen der Kopfstütze

Öffnen Sie den Reißverschluss des Bezuges der Kopfstütze. Lösen Sie die Schrauben am Rückenblech.

Sie können die Kopfstütze nun in der gewünschten Breite einstellen. Fixieren Sie die Schrauben nun wieder.

Zur Einstellung der Höhe beachten Sie bitte den Punkt 3.6 „Handhabung des verstellbaren Rückens“.



#### 3.2 Einstellen der Sitztiefe

Lösen Sie zuerst das Klettpolster im vorderen unteren Bereich des Sitzblechs. Lösen Sie dann jeweils beide Schrauben rechts und links. Sie können das Sitzblech nun in der gewünschten Tiefe einstellen.

Fixieren Sie anschließend wieder die Schrauben.



## 3. Handhabung des Grundmodells

### 3.3 Einstellen des Rückenwinkels

Der Rückenwinkel lässt sich stufenlos einstellen und in jeder Position arretieren. Dies gewährleistet, dass der Autositz in jeder Position stabil ist. Öffnen Sie die beiden Schnellspanner und bringen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position. Schließen Sie dann die Schnellspannhebel, um den Winkel zu fixieren.



### 3.4 Einstellen der Schulterführungspelotten

Lösen Sie die Schrauben der Schulterführungspelotten am Rückenblech des Sitzes. Sie können die Schulterpelotten nun in der gewünschten Breite einstellen. Fixieren Sie danach die Schrauben wieder.

Zur Einstellung der Höhe beachten Sie bitte den Punkt Punkt 3.6 „Handhabung des verstellbaren Rückens“.



### 3.5 Einstellen der Thoraxpelotten

### 3. Handhabung des Grundmodells

Lösen Sie die Schrauben der Thoraxpelotten am Rückenblech des Sitzes. Sie können die Thoraxpelotten nun in der gewünschten Breite einstellen. Fixieren Sie danach die Schrauben wieder.

Zur Einstellung der Höhe beachten Sie bitte den Punkt 3.6 „Handhabung des verstellbaren Rückens“.





## 3. Handhabung des Grundmodells

### 3.6 Handhabung des verstellbaren Rückens

Das neu konzipierte Rückenteil lässt sich teleskopierbar verstellen, sodass sich die Position der Kopfstütze, Schultergurte, Schulterführungspelotten und Thoraxpelotten gleichzeitig ändert.

Lösen Sie zunächst das Klettpolster (1) auf beiden Seiten des Sitzes. Danach lösen Sie jeweils die beiden Schrauben rechts und links am Rückenblech (2). Sie können das Rückenteil nun in der gewünschten Höhe einstellen. Fixieren Sie danach die Schrauben sowie die Polster wieder per Klett.

Bei Bedarf können Sie Teile des Rückenpolsters vom hinteren Teil des Sitzes verwenden um das Rückenpolster zu verlängern.




## 4. Verwendung des optionalen Zubehörs

### 4 Verwendung des optionalen Zubehörs

#### 4.1 Einbau im Auto – mit ISOFIX

Lassen sie sich den Einbau des Sitzes bei Übergabe und Anpassung des Autositzes vom Techniker demonstrieren.

Der KIDSFLEX-PRO wird mit den ISOFIX-Verriegelungsarmen in Ihrem Fahrzeug fest installiert. Ihr Kind wird dann mit dem 3-Punkt-Gurt des Fahrzeugs angeschnallt.

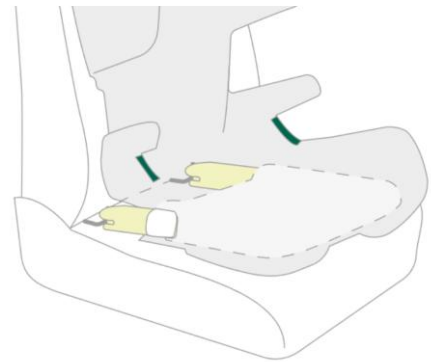

**TIPPI!** Die ISOFIX-Befestigungspunkte befinden sich zwischen dem Sitz und der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes.




1. Bringen Sie die Kopfstütze des Fahrzeugsitzes in ihre oberste Position.
2. Halten Sie den ISOFIX-Einstellhebel (siehe Bild) gedrückt und schieben Sie die ISOFIX-Rastarme mittels der roten Kordel ganz heraus.
3. Drücken Sie den Verriegelungsknopf und den roten Entriegelungsknopf auf beiden Seiten des Sitzes gegeneinander. Dadurch wird sichergestellt, dass beide Haken an den ISOFIX-Verriegelungsarmen geöffnet und einsatzbereit sind.





## 4. Verwendung des optionalen Zubehörs

4. Setzen Sie den Kindersitz in Fahrtrichtung auf einen dafür zugelassenen Fahrzeugsitz. Achten Sie darauf, dass die Rückenlehne flach an der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes anliegt.
5. Positionieren Sie die beiden ISOFIX-Rastarme direkt vor den beiden Einführhilfen.
6. Schieben Sie beide ISOFIX-Rastarme in die Einführhilfen bis die ISOFIX-Rastarme auf beiden Seiten mit einem „Klick“-Geräusch einrasten.

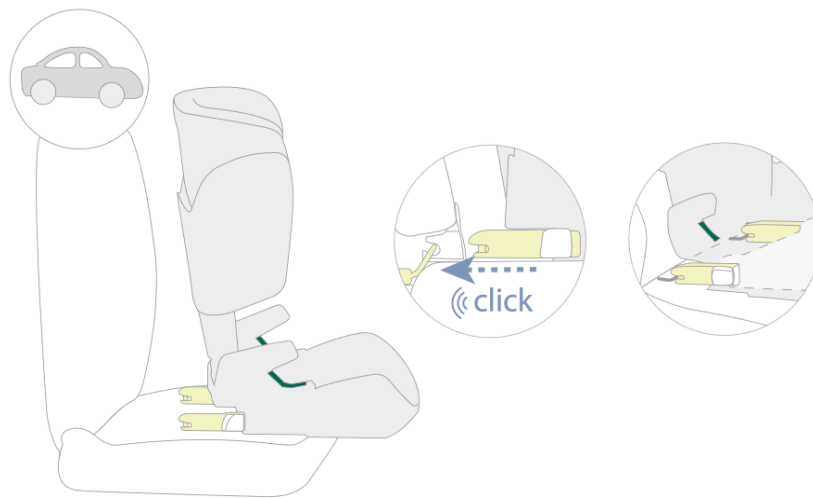

7. Halten Sie die ISOFIX-Einstelltaste gedrückt und schieben Sie den Kindersitz so weit wie möglich zurück.
8. Wackeln Sie am Kindersitz, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist.

## 4. Verwendung des optionalen Zubehörs

### 4.2 Stütz- und Sicherheitspolster


Installation:

1. Lassen Sie sich bei der Lieferung den Einbau und die Einstellung des Sitzes zeigen.
2. Kletten Sie das Stütz- und Sicherheitspolster auf die Befestigungshalter, nachdem Sie Ihr Kind hineingesetzt und angeschnallt haben.
3. Die Arme Ihres Kindes sollten auf dem Tisch ruhen, was zu einer aufrechten Sitzposition führt. Dies stützt den Oberkörper.
4. Achten Sie darauf, die Gefahr von Spielzeug zu vermeiden, das sich auf dem Polster befinden könnte. Verwenden Sie keine harten, festen oder gar scharfkantigen Gegenstände!



Die Befestigungshalter können in der Höhe verstellt werden. Lösen Sie dazu die beiden Schrauben und befestigen Sie diese in den gewünschten Befestigungslöchern.


Info: Wenn das Stütz- und Sicherheitspolster nicht benötigt wird, können Sie die beiden Halterungen rechts und links entfernen.

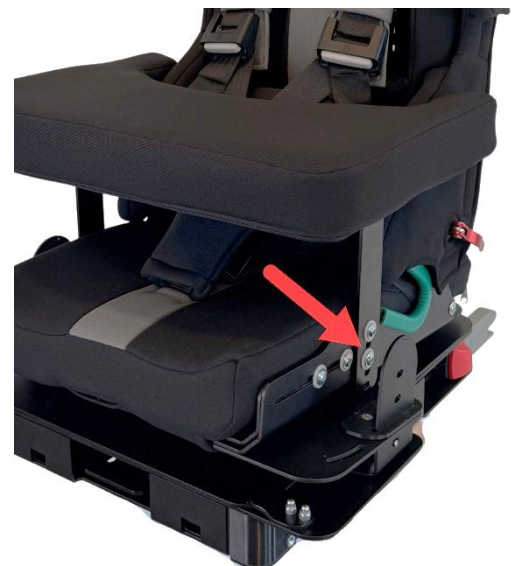

## 4. Verwendung des optionalen Zubehörs

### 4.3 Abduktionskeil

1. Der Abduktionskeil hilft Ihrem Kind, einen bestimmten Abstand zwischen den Knien zu erreichen.
2. Der Keil sollte, wie in der Abbildung gezeigt, an der Sitzpolsterung anliegen. Die Tiefe des Keils kann eingestellt werden. Dazu müssen die beiden Sechskantschrauben geöffnet und unter dem Sitz versetzt werden.
3. Der Keil sollte immer während der Fahrt verwendet werden (falls als Option gewählt), sonst könnte Ihr Kind durch die Befestigung verletzt werden.
4. Der Hebel kann in seiner Position verändert werden, indem er leicht nach vorne gezogen wird, ohne die Verschraubung zu bewegen. Achten Sie darauf, dass er oben ist und nicht im Weg liegt, da sonst die Waden Ihres Kindes damit in Berührung kommen können.

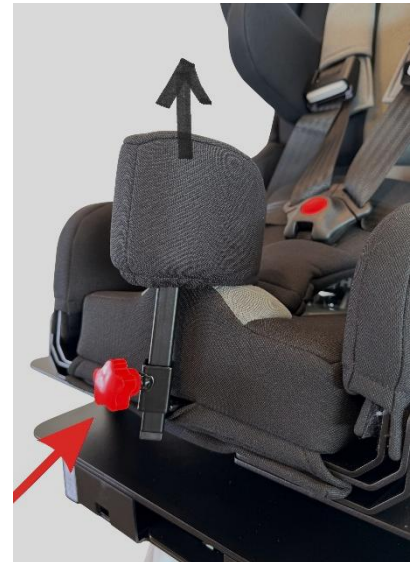

### 4.4 Sitzschrägverstellung

Wenn der Sitzwinkel des Fahrzeugsitzes nicht ausreicht, kann der Sitzwinkel des Autositzes durch die Sitzwinkelverstellung erhöht werden.

Betätigen Sie dazu die rote Kugel (siehe Abb.). Sobald sich der Sitz in der gewünschten Position befindet, kann die rote Kugel durch Drehen fixiert werden.



## 4. Verwendung des optionalen Zubehörs

### 4.5 Drehadapter

Um den täglichen Transfer Ihres Kindes ins Fahrzeug zu vereinfachen, empfehlen wir unseren Drehadapter, der den Autositz um 90° nach außen drehen lässt. Aus technischen Gründen ist nur EINE Drehrichtung möglich. Ein späterer Wechsel in die andere Richtung ist durch Umbau möglich. Die Verwendung eines ISOFIX-Adapters oder Klemmbügels wird empfohlen!

Um den Stuhl zu drehen, muss der Griff nach oben gezogen und gleichzeitig der Stuhl bewegt werden. Die optionale Fußstütze stoppt, um Kollisionen mit dem Beifahrersitz und der B-Säule zu vermeiden.

Achten Sie auf die Beine Ihres Kindes, wenn Sie den Sitz drehen!

Nach dem Transfer drehen Sie den KIDSFLEX-PRO einfach wieder in die Ausgangsposition zurück. Achten Sie auf das „Klick“-Geräusch, bei dem die Zunge wieder in die Arretierung einrastet.



## 4. Verwendung des optionalen Zubehörs

### 4.6 Einstellung der Beinführungen

Lösen Sie zuerst das Klettpolster im vorderen unteren Bereich des Sitzblechs. Heben Sie dann das Sitzpolster an. Darunter befinden sich für die Beinführungen jeweils zwei Langlöcher links und rechts. Lösen Sie die jeweiligen Schrauben. Sie können die Beinführungen nun in der gewünschten Breite einstellen.

Fixieren Sie anschließend wieder die Schrauben und kletten Sie das Sitzpolster wieder fest.



### 4.7 Fußbank / Fußstützrolle

Die Laschen (1) werden unterhalb der Sitzfläche des Autositzes mittels Zylinderschrauben in der Basisaufnahme fixiert, womit auch die Tiefe eingestellt werden kann.

Die Neigung der Haltestangen kann durch Öffnen der Schnellspannhebel (2) variiert werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass sich die Hebel im Anschluss in einer Position befinden, die nicht zu einer Verletzung führt!

Um die Höhe der Fußbank anzupassen, öffnen Sie die Madenschrauben (3) links und rechts. Nun kann die Höhe stufenlos verändert und die Madenschrauben wieder angezogen werden.





## 4. Verwendung des optionalen Zubehörs

### 4.8 Schutzmatte

Positionieren Sie die Schutzmatte auf dem Kfz-Sitz, ohne die Aussparungen für den ISOFIX (falls vorhanden) zu blockieren.

Stellen Sie den KIDSFLEX-PRO mittig auf die Schutzmatte und sichern Sie ihn wie in Kapitel 4.1 **Fehler! Verweisquelle**



konnte nicht gefunden werden. erläutert.




### 4.9 Verbindungsgurt für Schultergurte

## 4. Verwendung des optionalen Zubehörs

Positionieren Sie den Gurt auf der Höhe der Brust Ihres Kindes. Halten Sie einen ausreichenden Abstand zum Hals ein! Um ein Verrutschen des Gurtes zu vermeiden, sind die Innenseiten mit Klettband ausgestattet. Um diesen zu lösen, lockern Sie ihn mit den Fingern.

Stellen Sie nun die Breite des Gurtes ein, indem Sie den Gurt aus dem Schieber (2) herausfädeln und danach das Gurtschloss (1) entsprechend weiten.

Nun wieder das lose Gurtende mittels des Schiebers (2) sichern, um ein ungewolltes Lockern des Gurtes zu verhindern.

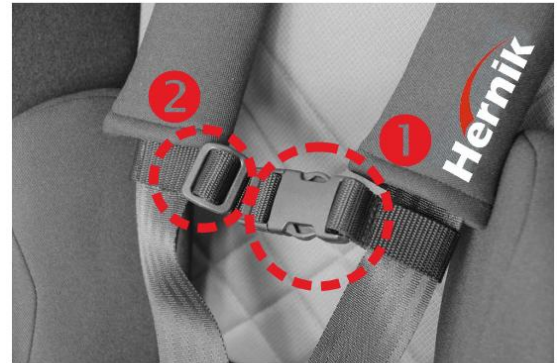

## 5. Garantie

### 5 Garantie

HERNIK-Produkte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengen Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise Grund zur Beanstandung haben, so garantiert die HERNIK GmbH entsprechend den allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach Lieferung:

- 24 Monate auf den Rahmen
- 12 Monate auf alle beweglichen Teile

Für Sonderanfertigungen kann keine Garantie übernommen werden, soweit diese sich nicht aus Fertigungs- oder Materialfehlern begründet. Hier wird Ersatz des zu beanstandenden Produktes 12 Monate gewährt.

Für Teile, die einem regelmäßigen Verschleiß, übermäßiger Belastung oder gewaltsamer Beschädigung unterliegen, kann keine Garantie übernommen werden.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, dass das Gerät ordnungsgemäß, entsprechend der Gebrauchsanweisung, verwendet wurde.

Bei konstruktiven Veränderungen, Nacharbeiten oder unsachgemäßen Instandsetzungen ohne vorherige Abstimmung mit der HERNK GmbH entfällt der Garantieanspruch.

Weitergehende Ansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtgrund, insbesondere auf Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens sind ausgeschlossen.



## 6. Kennzeichnung

### 6 Kennzeichnung

Auf der Rückseite des Autositzes finden Sie die folgende Kennzeichnung:




**Rückhalteeinrichtung für spezielle Anforderungen "S" (DE)**

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung!



**Rückhalteeinrichtung für spezielle Anforderungen "S" (DE)**

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung!

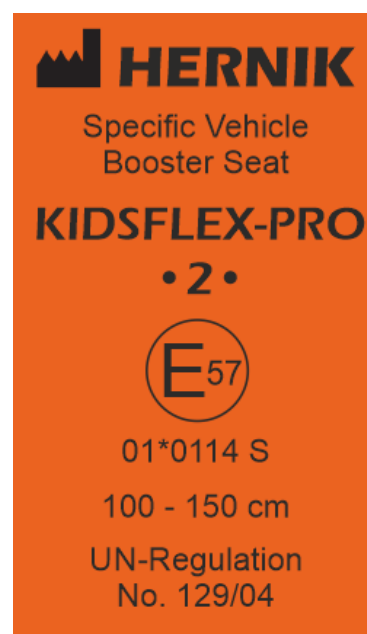

## 7. Wartung & Pflege

### 7 Wartung & Pflege


#### 7.1 Abziehen des Bezugs

Der Bezug kann abgenommen und mit einem milden Waschmittel im Feinwaschprogramm der Waschmaschine (30 °C) gewaschen werden. Bitte beachten Sie die Anleitung auf dem Waschetikett des Bezugs.

Die Kunststoffteile können mit Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (wie Lösemittel).

**ACHTUNG!** Der Auto-Kindersitz darf nicht ohne Sitzbezug verwendet werden

1. Entfernen Sie (falls vorhanden) die Kopfstütze indem Sie die Schraube lösen.
2. Lösen Sie nun die Schultergurte vom Klettstreifen an der Innenseite des Rückenblechs.
3. Nun kann das Rückenpolster abgenommen werden.
4. Öffnen Sie jetzt den Reißverschluss und ziehen Sie die Bezüge ab.
5. Für das Sitzpolster zuerst die Gurtverbindung zwischen Gurtschloss und Sitzblech lösen.
6. Sitzblech abnehmen, Reißverschluss öffnen und Bezüge abziehen.

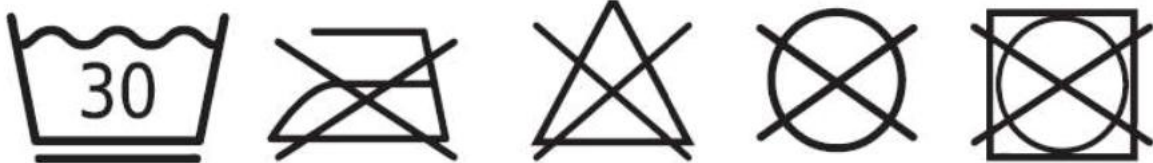

7.

## 8. Technische Daten

### 8 Technische Daten

	Gr. 1	Gr. 2
Scheitelhöhe	56 - 71 cm	58 - 73 cm
Rückenhöhe	33 - 48 cm	33 - 51 cm
Sitzbreite	28 cm	33 cm
Sitztiefe (einstellbar)	31 - 37 cm	36 - 42 cm
Höhe Thoraxpelotten	19 - 38 cm	24 - 43 cm
Höhe Oberkörperführungsp.	23 - 42 cm	28 - 47 cm
Abstand Thoraxpelotten/OKFP	14 - 25 cm	17 - 28 cm
Körpergröße	100 - 125 cm (max. 50 kg)	100 - 150 cm (max. 50 kg)
Gesamthöhe	71 - 86 cm	72 - 87 cm

\*Einige Angaben können je nach Zubehör variieren

#### Standard-Ausstattung:

- 5-Punkt-Gurt mit Prallpolster und Schulterpolsterungen
- Kopfstütze Standard
- einstellbare Sitztiefe
- stufenlose Rückenwinkelverstellung
- Thoraxpelotten
- Schulterführungspelotten
- verstellbarer Rücken
- Gurtführung (rechts oder links montiert)

## Notizen



**HERNIK GmbH**  
**Gewerbering 8**  
**83543 Rott am Inn • Germany**

 **+49 8039-9093930** •  **+49 8039-90939319**  
 **info@hernik.de** •  **www.hernik.de**